

Manual do usuário do aplicativo Thrive Hearing Control

Parabéns por sua jornada em
direção a uma audição melhor

thrive



Aplicativo Thrive Hearing Control

Índice

Introdução	4
Usuários Apple	
Emparelhamento/conexão	5
Download	8
Usuários Android	
Download	9
Emparelhamento/conexão	10
Tela principal	
Status da conexão	13
Assistente Thrive	13
Pontuação de bem-estar	13
Memória atual	13
Configurações/ajuda	13
Volume	14
Mudo	14
Edge Mode	14
Navegação	15
Tela inicial	15
Menu de memórias	15
Personalizar telas	
Personalizar telas	16
Equalizador	16
Fala em ruído	16
Ruído de máquina	17
Vento	17
Direção do microfone	18
SoundSpace	18

Telas da pontuação de bem-estar	
Geral	19
Engajamento	19
Atividade	20
Detecção e alertas de queda	21
Acessórios	23
Voice AI.	23
Configurações	
Guia do usuário	24
Configurações do dispositivo	24
Pontuação de bem-estar	25
Alerta de queda	26
Traduzir	27
Transcrever	27
Auto verificação	28
Lembretes	28
Programação remota TeleHear.	30
Aplicativo Thrive Care	31
Encontrar meus aparelhos auditivos	31
Configurações do aplicativo	32
Sobre	32
Modo demonstração	32
Informações de segurança	33

Todos os recursos variam de acordo com o modelo e nível de tecnologia do aparelho auditivo. Solicite informações específicas ao seu profissional de audição.

Este aplicativo pode apresentar pequenas diferenças dependendo do seu telefone e/ou modelo de aparelho auditivo.

Aparelhos auditivos compatíveis com o Thrive



Acima estão apresentados os aparelhos auditivos de 2,4 GHz da plataforma Thrive que funcionam com o aplicativo Thrive Hearing Control.

Apple ou Android

Os sistemas operacionais iOS ou Android são responsáveis por gerenciar a conectividade entre seu(s) dispositivo(s) Apple ou Android e os aparelhos auditivos compatíveis com o Thrive. O aplicativo Thrive Hearing Control é um suplemento aos seus aparelhos auditivos e oferece diversas capacidades de ajuste aprimoradas. Com o Thrive, você pode personalizar seus aparelhos auditivos para se adequarem ao seu estilo de vida.



AVISO DE ATUALIZAÇÃO iOS: Ao atualizar a versão do iOS em seu iPhone, os aparelhos auditivos podem perder a conexão, exigindo que você desemparelhe e re-emparelhe os aparelhos auditivos com seu iPhone.

Para obter as informações de compatibilidade mais recentes, visite starkey.com/thrivesupport

Conectividade para dispositivos Apple

Para usar o aplicativo Thrive, primeiro é necessário emparelhar seus aparelhos auditivos com seu dispositivo iOS.



1. Certifique-se de que a configuração do Bluetooth® esteja habilitada em seu dispositivo iOS. No menu Configurações, acesse Bluetooth e altere para **Ativado**.
2. Desligue seus aparelhos auditivos e ligue-os novamente. Isso colocará os aparelhos auditivos no modo de emparelhamento.
3. No menu Configurações, vá para **Acessibilidade > Aparelhos auditivos**.
 - Você verá o nome do seu aparelho auditivo (por exemplo, "Aparelho auditivo do Chris") quando o dispositivo iOS detectar seus aparelhos auditivos pela primeira vez.
 - Se o seu nome não aparecer na lista de "Dispositivos" dentro de 5 a 7 segundos, toque em **Acessibilidade** no canto superior esquerdo e, em seguida, em **Aparelhos auditivos**.

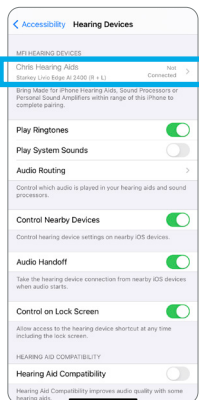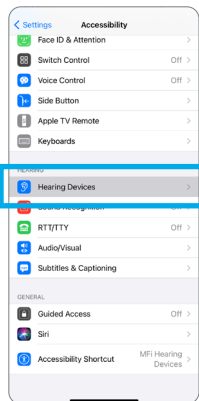

6 | Apple: Emparelhamento/conexão

4. Toque no nome do aparelho auditivo para conectar seus aparelhos auditivos ao dispositivo iOS.
5. Você verá duas solicitações de emparelhamento (uma para cada aparelho auditivo). Selecione **Emparelhar** para cada solicitação. Essas solicitações podem acontecer com vários segundos de intervalo.
6. Quando o emparelhamento for concluído, o nome do seu aparelho auditivo mudará de preto para azul.

Agora você pode usar seu dispositivo iOS para ajustar seu aparelho auditivo. É possível ajustar com os controles nativos do iOS ou com o aplicativo Thrive.

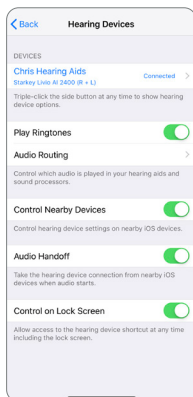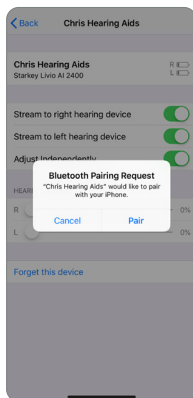

Reconectando seus aparelhos auditivos ao seu dispositivo Apple

Ao desligar seus aparelhos auditivos ou dispositivo Apple, eles perderão a conexão um com o outro. Para reconectar, ligue seu dispositivo Apple e, em seguida, ligue seus aparelhos auditivos.

Os aparelhos auditivos se conectarão automaticamente ao seu dispositivo Apple. Você também pode verificar a conexão acessando o atalho Acessibilidade clicando três vezes no [botão de Tela inicial](#) (iPhone 8 ou versões anteriores) ou no botão lateral (iPhone X e versões mais recentes) em seu dispositivo iOS.


Download do aplicativo Thrive para dispositivos Apple

O aplicativo Thrive facilita o controle e ajuste de seus aparelhos auditivos usando seu dispositivo Apple compatível. Baixar o aplicativo é fácil. Siga as instruções passo a passo abaixo:

Primeiro passo: Em um dispositivo Apple compatível, abra a “App Store”.



Segundo passo: Digite “Thrive Hearing Control” na barra de pesquisa.

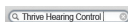

Terceiro passo: Toque em “Obter” para baixar o aplicativo em seu dispositivo. Siga os avisos na tela para instalar o aplicativo.



Quarto passo: Quando estiver instalado, abra o aplicativo Thrive a partir da sua tela inicial ou da lista de aplicativos.



Download do aplicativo Thrive para dispositivos Android

O aplicativo Thrive facilita o controle e ajuste de seus aparelhos auditivos usando seu dispositivo Android compatível. Baixar o aplicativo é fácil. Siga as instruções passo a passo abaixo:

Primeiro passo: Em um dispositivo Android compatível, abra a “Google Play Store”.



Segundo passo: Digite “Thrive Hearing Control” na barra de pesquisa.

← Thrive Hearing Control 🔍

Terceiro passo: Toque em “Instalar” para baixar o aplicativo em seu dispositivo. Siga os avisos na tela para instalar o aplicativo.

Obter

Quarto passo: Quando estiver instalado, abra o aplicativo Thrive a partir da sua tela inicial ou da lista de aplicativos.



Conectividade para dispositivos Android

Siga as instruções abaixo para conectar seus aparelhos auditivos ao seu dispositivo Android. Se seus aparelhos auditivos perderem a conexão com seu dispositivo, repita as instruções abaixo para reconectar.

1. Toque no ícone de Configurações em seu dispositivo.
2. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado.
3. Desligue seus aparelhos auditivos e ligue-os novamente. Isso colocará os aparelhos auditivos no modo de emparelhamento.
4. Quando os aparelhos auditivos forem detectados, você verá "Aparelho auditivo" seguido de seu primeiro nome ("Aparelho auditivo de Michelle") em Dispositivos disponíveis. Você verá esta indicação para cada dispositivo.
5. Toque no nome do aparelho auditivo para conectar cada aparelho auditivo ao dispositivo.

NOTA: Se preferível, o emparelhamento também pode ser realizado através do menu Bluetooth do seu dispositivo Android.

Reconectando seus aparelhos auditivos ao seu dispositivo Android

Ao desligar seus aparelhos auditivos ou dispositivo Android, eles perderão a conexão um com o outro. Para reconectar, ligue seu dispositivo Android e, em seguida, ligue seus aparelhos auditivos.

Os aparelhos auditivos se conectarão automaticamente ao seu dispositivo Android. Se você tiver problemas para reconectar seus aparelhos auditivos e o aplicativo, verifique as configurações Bluetooth no seu dispositivo Android para assegurar que seus aparelhos auditivos ainda estão emparelhados; em caso negativo, repita o processo de emparelhamento.

Inicialização/definições

Na primeira vez que o aplicativo Thrive iniciar, você será solicitado a ler e reconhecer o contrato de licença e a política de privacidade, bem como personalizar as definições do aplicativo. Você terá a opção de definir alertas de notificação e uma conta na nuvem para o recurso de programação remota TeleHear. O aplicativo Thrive será padronizado para o modo Avançado; você pode escolher a definição de modo Básico após a instalação através do menu Configurações.

12 | Tela inicial



Este aplicativo pode apresentar pequenas diferenças dependendo do seu telefone e/ou modelo de aparelho auditivo.

Status da conexão

Toque para ver o status da conexão atual para seus aparelhos auditivos.

Assistente Thrive*

Com o Assistente Thrive, você pode acionar um assistente de voz dentro do aplicativo Thrive para responder a perguntas ou atender a comandos. O Assistente Thrive pode ser acionado através de um ícone no aplicativo Thrive ou com um toque duplo em seus aparelhos auditivos. Você pode usar a própria voz para fazer perguntas sobre o Thrive, fazer perguntas gerais que são respondidas da Internet (se você estiver logado), comandar alterações de memória e volume em seus aparelhos auditivos, criar um lembrete ou mesmo encontrar seu telefone. Exemplos de comando de voz: "alterar minha memória para restaurante" ou "criar um lembrete para buscar minha receita amanhã às 15:00" ou "onde está meu telefone?".

Pontuação de bem-estar

Uma visão do monitoramento de atividade e de engajamento.

Memória atual

A memória atual que você está usando é apresentada aqui.

Configurações

Toque para abrir o Menu. Consulte a seção Configurações para obter a descrição completa.

O recurso **Ajuda** explica a função de cada tela disponível. Todos os arquivos de ajuda podem ser encontrados em [Configurações > Guia do usuário](#).

**Exige uma conta na nuvem.*

Volume


Aumente/diminua o nível de volume em seus aparelhos auditivos deslizando o cursor de volume para cada lado ou utilizando os ícones de volume (entre os cursores de volume direito e esquerdo) para ajustar ambos os lados simultaneamente. Toque duas vezes em qualquer lugar nos ícones para retornar seu volume para o nível padrão definido por seu profissional de audição.

Mudo

Toque no botão Mudo para silenciar os microfones em ambos os aparelhos auditivos. Toque no botão novamente para ativar o som dos aparelhos auditivos.


Edge Mode

Tocar no ícone do Edge Mode permite que você inicie uma avaliação automática do ambiente de audição atual. Seus aparelhos auditivos IA criarão configurações otimizadas para você com base nas características daquele ambiente específico. O Edge Mode pode ser acionado (se configurado) através de um controle do usuário em seu aparelho auditivo ou através do botão Edge Mode na tela inicial. Essas configurações estão em vigor até que você mude de memória ou reinicie seus aparelhos auditivos.

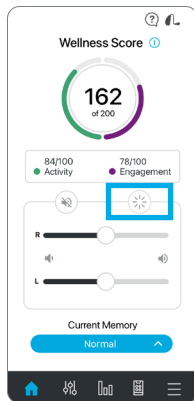

Navegação

A Barra de navegação na parte inferior da tela fornece acesso às seções comumente utilizadas: Personalizar, Pontuação do Thrive, Acessórios e Configurações.

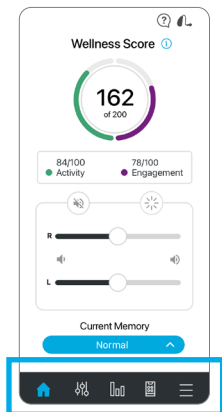


Tela inicial

Toque no ícone da Tela inicial na barra de navegação para retornar à tela principal.

Menu de memórias

Toque no ícone do Menu de memórias para ver e selecionar as memórias disponíveis ou para criar uma nova memória ou editar uma memória.

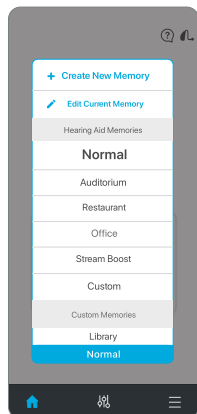


Personalizar telas

Toque em Personalizar na barra de navegação para ter acesso a uma variedade de controles de ajuste para personalizar as memórias do seu aparelho auditivo.


Equalizador

Personalizar oferece barras equalizadoras para diversas faixas de frequência. Você pode deslizar para cima/para baixo para ajustar de acordo com sua qualidade de som preferida. Você pode ajustar individualmente para cada memória.

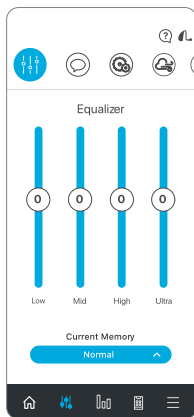


Fala no ruído

Fala em ruído reduz a quantidade de ruído de fundo captada por seus aparelhos auditivos. Você pode ajustar individualmente para cada memória do aparelho auditivo. O ajuste mais à direita fornece mais conforto em meio ao ruído.

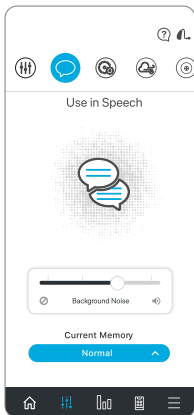


Ruído da máquina

Ruído de máquina reduz sons produzidos por máquinas para aumentar seu conforto em ambientes ruidosos. O ajuste mais à direita fornece mais conforto em meio ao ruído.

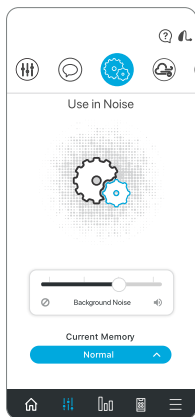


Vento

Vento lhe permite reduzir o som do vento soprando no microfone de seu aparelho auditivo por memória. Ajustar mais à direita fornece mais conforto em meio ao vento.

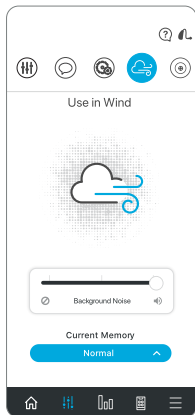


Direção do microfone

Direção do microfone fornece a capacidade de controlar o som ao seu redor em cada memória. Use esta opção para melhorar sua capacidade de ouvir uma conversa focando o microfone nos sons à sua frente. O modo automático segue o som da fala com base nos níveis de ruído.

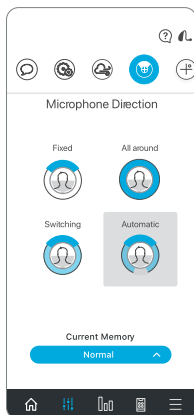

SoundSpace

SoundSpace permite que você transforme seu dispositivo iOS em uma ferramenta de ajuste de configurações pessoais para seus aparelhos auditivos. Ele fornece a capacidade de modificar a resposta a qualquer uma de suas memórias personalizadas no Thrive para melhor se adequar a um ambiente específico. Ao mover seu dedo pela tela em branco, as configurações em seus aparelhos auditivos se alterarão temporariamente para que você possa ouvir uma variedade de opções.

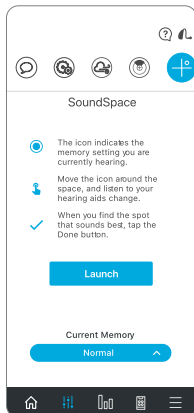

Pontuação de bem-estar

A pontuação de bem-estar **Geral** é uma combinação das pontuações de Engajamento e de Atividade. Você pode alcançar uma pontuação de 200 a cada dia.


O monitoramento de **Engajamento** é composto por três segmentos. Cada segmento tem um valor de pontos que reflete como você está usando seus aparelhos auditivos.

O aplicativo Thrive lê os dados de uso dos seus aparelhos auditivos e mostra seus pontos de progresso diário. Sua meta é de 100 pontos por dia.

Pontos de **Uso** são obtidos usando seus aparelhos auditivos diariamente. Quanto mais você usá-los, mais pontos você obtém (máximo de 40).

Pontos de **Interação** são obtidos usando seus aparelhos auditivos para se engajar com outras pessoas. Quanto mais tempo você passar em ambientes de conversação, mais pontos você obtém (máximo de 40).

Pontos de **Ambiente** são obtidos quando os aparelhos auditivos se adaptam a ambientes de audição desafiadores (máximo de 20).

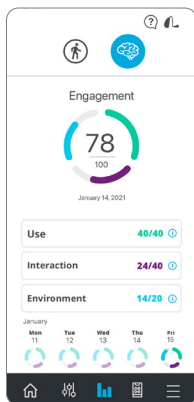


20 | Telas de pontuação Thrive

O monitoramento de **Atividade** é composto pelo progresso em direção a três metas diárias de atividade física. Alcançar as três metas fornecerá um total de 100 pontos. O aparelho auditivo monitora passos e os dados são transmitidos para o aplicativo ao longo do dia. Você pode definir/modificar as metas na área de Configurações.

Passos mostra seu progresso em direção à meta diária de contagem de passos (máximo de 40 pontos).

Exercício mostra seu progresso em direção à sua meta diária de exercício vigoroso (máximo de 40 pontos).

Levantar mostra seu progresso em direção à meta de se levantar e se mover a cada hora (máximo de 20 pontos).

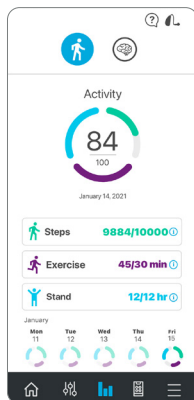

NOTA: Os aparelhos auditivos devem se conectar regularmente ao telefone ao longo do dia e o aplicativo Thrive deve ser mantido aberto em segundo plano no seu telefone.



Detecção e alertas de queda

O recurso Alerta de queda pode ser usado para enviar uma mensagem de texto de alerta contendo sua localização por GPS aos seus contatos designados, caso você sofra uma queda ou passe por um evento não relacionado a quedas. O Alerta de queda pode ser configurado para enviar alertas automáticos e/ou iniciados manualmente.

O **Alerta automático** habilita os sensores em seus aparelhos auditivos para detectar uma queda automaticamente.

O **Alerta Manual** permite que você pressione e segure o controle do usuário em qualquer um dos aparelhos auditivos para iniciar uma mensagem de texto de alerta.


Uma mensagem de texto de alerta será iniciada pelo aplicativo Thrive quando uma queda for detectada automaticamente ou iniciada manualmente por você. A mensagem de texto será enviada a um máximo de três contatos predefinidos, que podem confirmar o recebimento da mensagem e visualizar um mapa com a indicação de sua localização.

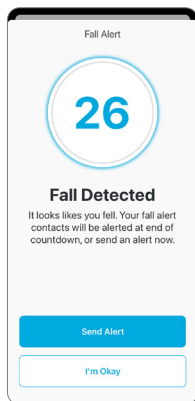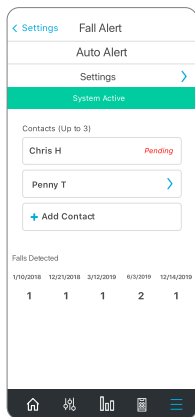

22 | Detecção e alertas de queda

O **Cancelamento de alerta** permite que você cancele o alerta, seja ele automático ou manual, a partir dos seus aparelhos auditivos ou do seu smartfone. Para cancelar uma mensagem de texto de alerta dos seus aparelhos auditivos, pressione o controle do usuário em qualquer um dos aparelhos auditivos. Para cancelar do seu smartfone, toque em “Estou bem” no aplicativo Thrive. Você será informado do cancelamento no aplicativo Thrive e através de um indicador de voz em seus aparelhos auditivos. As mensagens do Alerta de queda podem ser canceladas dentro do tempo de cancelamento pré-selecionado de 60 ou 90 segundos após o início do alerta.



Contatos permite que você identifique até três contatos para os quais deseja enviar mensagens de texto de alerta. É necessário inserir o nome e o número do smartfone de cada contato no aplicativo Thrive. Cada um de seus contatos receberá uma mensagem de texto solicitando que confirmem a participação em seu sistema Alerta de queda.

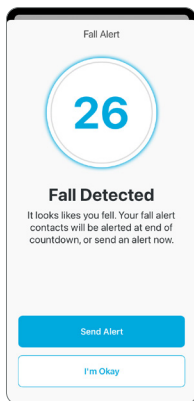

Acessórios

O aplicativo Thrive fornece a capacidade de controlar a transmissão de áudio da maioria dos acessórios de 2,4 GHz. Esses acessórios emparelham diretamente com seus aparelhos auditivos. Ao tocar no ícone Acessórios na barra de navegação, você pode selecionar um acessório emparelhado, iniciar e interromper a transmissão de áudio e controlar o volume tanto da transmissão quanto dos sons ao redor.

A **Voice AI*** combina as vantagens de um microfone em seu smartphone com o poder computacional da inteligência artificial. O benefício é um aprimoramento de fala mais poderoso e flexível nos ambientes de audição mais exigentes (apenas para pacientes com perda auditiva grave). Solicite mais informações ao seu profissional de audição.

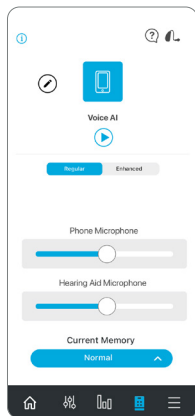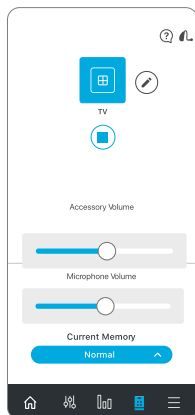

**Disponível apenas para smartphones iOS.*

Guia do usuário

Uma visão geral de cada tela/recurso está disponível no aplicativo Thrive. Cada seção apresenta os detalhes da tela e descreve cada função.

Configurações do dispositivo

Configurações avançadas para seus aparelhos auditivos podem ser ligadas/desligadas ou definidas nesta área.

Gesto de toque permite que você habilite ou desabilite o gesto de toque, defina a sensibilidade e escolha o recurso a ser ativado pelo gesto de toque (Assistente Thrive, início/interrupção de transmissão de acessório ou Edge Mode).

Microfone do assistente Thrive pode ser acessado tocando em *Mic AA* ou *Mic Fone* para selecionar qual microfone será usado pelo Assistente Thrive. O *Mic AA* é a configuração padrão.

Modo máscara é uma memória personalizada que compensa a perda de audibilidade da fala devido ao uso de máscaras faciais aumentando o som nas regiões de frequência afetadas. Alternar para o Modo máscara o tornará selecionável no menu Memórias.

Transmissão automática permite que seus aparelhos auditivos reconheçam quando uma transmissão de áudio se inicia e automaticamente altera para uma memória diferente e redução de microfone especificamente otimizadas para transmissão de áudio.

Aumento de conforto permite que seus aparelhos auditivos reduzam o ruído ativamente enquanto otimizam a qualidade do som em ambientes ruidosos. Este recurso só está disponível se seus aparelhos auditivos não forem compatíveis com o Edge Mode.

Alertas permite que seu aparelho auditivo toque um tom de alerta para determinadas notificações do telefone, como eventos no calendário, e-mail e mídias sociais.

Ligar/desligar automaticamente economiza a potência da bateria de maneira fácil e automática quando você não está usando seus aparelhos auditivos. Remova-os, coloque-os em uma superfície plana e estável, e eles entrarão em um estado de baixa potência após 15 minutos. Pegue seus aparelhos auditivos e coloque-os no ouvido novamente para retornar à potência normal automaticamente.

Pontuação de bem-estar

Navegar para a Pontuação de bem estar através das Configurações permite que você adicione/atualize seus dados demográficos para que a atividade de monitoramento de passos seja mais precisa. Além disso, você pode definir/modificar suas metas de Passos, Exercício e Levantar.

Alerta de queda

A sensibilidade do **Alerta automático** permite que você ajuste a sensibilidade do seu alerta automático no aplicativo Thrive. Aumentar a sensibilidade pode aumentar a probabilidade de detectar uma queda. Diminuir a sensibilidade pode ajudar a reduzir a probabilidade de alertas falsos.

Perfil permite que você modifique suas informações de perfil.


Indicadores de **Alerta automático e**

Alerta manual fornecem a capacidade de revisar e demonstrar os indicadores do Fall Alert para criar familiaridade em caso de queda.

Contatos permite que você adicione, edite ou exclua um contato.

Cronômetro de cancelamento permite que você selecione um tempo alocado de 60 ou 90 segundos antes que uma mensagem de texto de alerta seja enviada.

Mensagem de alerta permite que você edite seu nome e exibe um exemplo de mensagem de texto de alerta.

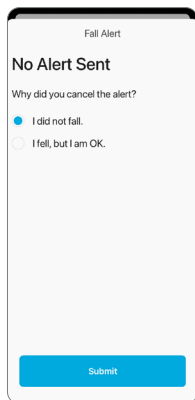

Fall Alert

No Alert Sent

Why did you cancel the alert?

☒ I did not fall.

☐ I fell, but I am OK.



Submit

Traduzir

Traduzir é um recurso que lhe permite escolher seu idioma e o idioma de outro interlocutor para participar de uma conversa. Quando você falar ao telefone, o aplicativo traduzirá sua fala e exibirá no idioma da outra pessoa. Quando a outra pessoa falar ao telefone, o aplicativo traduzirá a fala dela, exibirá no seu idioma e transmitirá o texto traduzido para seus aparelhos auditivos em seu idioma.

Transcrever

Transcrever é um recurso que lhe permite ter legendas para situações da vida real. Quando você ou outras pessoas falarem ao telefone, o aplicativo Thrive transcreverá essa fala e exibirá na sua tela. Há também a opção de salvar ou copiar o texto transcrito, assim como enviá-lo por mensagem ou e-mail.

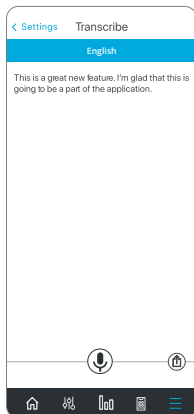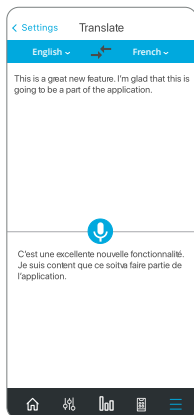



Auto verificação

Auto verificação fornece a você uma maneira rápida e eficiente de analisar o desempenho de seus aparelhos auditivos por conta própria. Com a Auto verificação, você pode executar um diagnóstico do desempenho dos componentes dentro de seu(s) aparelho(s) auditivo(s), incluindo microfones, receptor, circuito e sensores.

A Auto verificação exibirá o desempenho dos componentes e fornecerá instruções de manutenção, caso necessário (a maioria dos problemas se devem à presença de cera/detritos e podem ser facilmente resolvidos). Seus aparelhos auditivos virão com uma referência já estabelecida.

Lembretes



O recurso Lembretes pode ajudar você a monitorar tarefas e compromissos importantes em sua vida cotidiana, sem ter que lembrar deles sozinho.

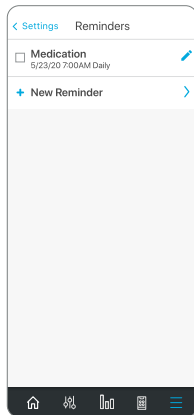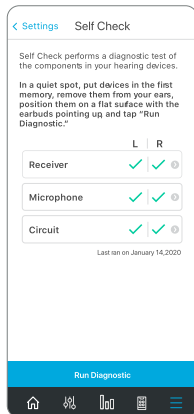

Você pode criar e receber notificações visuais de lembretes em seu smartfone e/ou notificações sonoras de lembretes transmitidas do seu smartfone através de seus aparelhos auditivos para um multitude de tarefas, como tomar medicamentos, buscar receitas, limpar seus aparelhos auditivos, se exercitar e beber água.

Além disso, você pode personalizar seus lembretes, por exemplo: tomar medicamento para pressão, passear com o cachorro, ligar para a fisioterapeuta, levar garrafa d'água e tapete para a ioga. Depois de definir o nome, data e horário do lembrete, você pode selecionar a opção para que este lembrete se repita a cada dia, semana, mês ou ano.

E você não precisa se preocupar se não conseguir concluir a tarefa no momento em que receber o lembrete, pois tarefas atrasadas serão exibidas em vermelho na tela Lembretes até que você as marque.

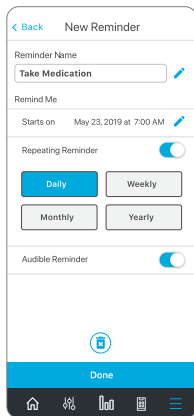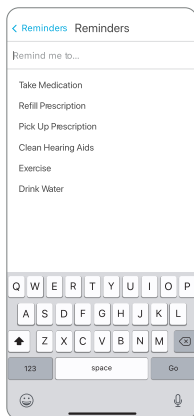

Programação remota TeleHear

Criando uma conta


O TeleHear exige que você crie sua própria conta. Através dessa conta, a cópia de segurança e a sincronização de seus aparelhos auditivos podem ser feitas em vários telefones. Você pode criar uma conta durante o processo de instalação ou mais tarde, se desejar. Você pode criar uma conta usando suas contas existentes de Facebook ou Google, ou criando sua própria conta usando um e-mail e uma senha de sua escolha.

Cópia de segurança

Quando você faz quaisquer alterações utilizando o aplicativo Thrive, estas alterações são salvas em sua conta na nuvem para fazer uma cópia de segurança de suas configurações em tempo real.

Participar de sessão ao vivo


Você pode obter um código do seu profissional de audição para habilitar a programação remota como uma opção. Isso permite que você se conecte diretamente com seu profissional de audição para que ele possa refinar sua experiência de audição através de uma sessão de vídeo.

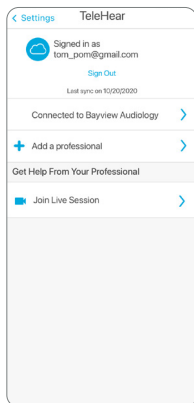

Aplicativo Thrive Care


O aplicativo Thrive Care oferece tranquilidade àqueles com quem você escolhe compartilhar informações úteis, enquanto ajuda você a se sentir confiante e independente.

Com o Thrive Care, você pode compartilhar informações como atividade física, uso do aparelho auditivo, engajamento social e mais, com seus cuidadores ou entes queridos.

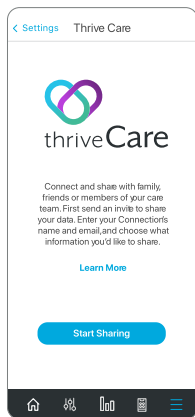

Encontre meus aparelhos auditivos

O recurso Encontrar meus aparelhos auditivos permite que você rastreie a última localização física conhecida de seus aparelhos auditivos em um mapa. Quando o recurso Encontrar meus aparelhos auditivos for acessado, você verá um mapa com uma nota mostrando a localização onde seus aparelhos auditivos foram conectados pela última vez. Se seus aparelhos auditivos estiverem ativamente conectados (ou se tornarem conectados), as barras na parte inferior da tela se moverão para indicar o quão perto ou longe você está de seus aparelhos auditivos.

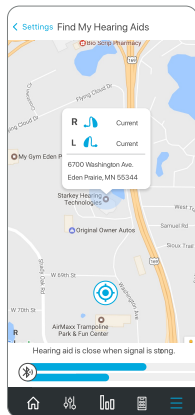

Configurações do aplicativo

Opções em Configurações do aplicativo incluem a capacidade de alterar entre os modos Básico e Avançado. O modo Avançado fornece funcionalidades totais para cada recurso no aplicativo, enquanto o modo Básico inclui um subconjunto que contém apenas o essencial para simplificar as coisas.

Sobre

Fornece informações sobre a Starkey, o contrato de licença do usuário final, a política de privacidade e a versão do aplicativo. Há também uma seção para fornecer feedback.

Modo demonstração

Coloca o aplicativo Thrive em um modo de demonstração, permitindo que o aplicativo funcione sem estar conectado a nenhum aparelho auditivo para que todos os recursos sejam visíveis a título de demonstração. Ajustes feitos no Modo demonstração não serão aplicados aos seus aparelhos auditivos.

Informações de segurança

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao seu dispositivo Starkey deve ser notificado ao seu representante local da Starkey Hearing Technologies e às autoridades competentes do estado-membro no qual você está estabelecido. Um incidente grave é definido como qualquer funcionamento indevido, deterioração das características e/ou do desempenho do dispositivo, ou inadequação no Manual de Operações/rotulagem do dispositivo que possa resultar em óbito ou deterioração grave do estado de saúde do usuário, OU que possa ocasionar essas situações de maneira recorrente.

Uso pretendido

O aplicativo Thrive Hearing Control é um software de dispositivo médico que permite a um usuário controlar remotamente o volume, a seleção de memórias, a ativação/desativação do som, o início/interrupção de transmissão de mídia e o recurso de mascaramento de zumbido dos aparelhos auditivos sem fio de 2,4 GHz da Starkey. Ele também fornece uma interface de telefone celular para estes aparelhos auditivos e permite que o usuário use seu dispositivo iOS como um dispositivo de transmissão de áudio.

Indicações de uso

O aplicativo Thrive Hearing Control é um programa opcional indicado para pacientes que utilizam os aparelhos auditivos sem fio de 2,4 GHz da Starkey e que desejam usar um dispositivo iOS ou Android para servir de controle remoto, interface de telefone celular ou transmissor de mídia.

[illegible]

[illegible]

Para acessar uma versão eletrônica deste guia do usuário, visite www.starkey.com/support/operations-manuals.

Para obter informações de compatibilidade do aplicativo Thrive Hearing Control e iOS/Android, visite starkey.com/thrivesupport.

Apple, o logotipo Apple, iPhone, iPad e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço registrada da Apple Inc.

Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Starkey, o logotipo Starkey, SoundSpace, Thrive, o logotipo Thrive, Thrive Care, o logotipo Thrive Care e TeleHear são marcas comerciais da Starkey Laboratories, Inc.

iOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países, utilizada sob licença.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Starkey é feito sob licença.



Starkey.com

6700 Washington Ave. S.
Eden Prairie, MN 55344
1.800.328.8602

