


Thrive Hearing Control App - Bedienungsanleitung

GLÜCKWUNSCH ZU IHREM
SCHRITT ZUM BESSEREN HÖREN

thrive

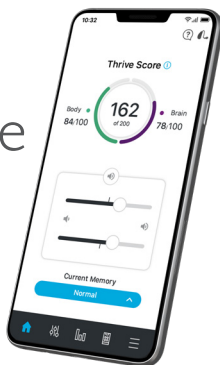

Thrive Hearing Control App

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
Apple Nutzer	
Herunterladen	5
Koppeln/Verbinden iOS	6
Android Nutzer	
Herunterladen	9
Koppeln/Verbinden	10
Startbildschirm	
Einstellungen	13
Thrive Assistent	13
Aktuelles Hörprogramm	13
Thrive Score	13
Lautstärke	14
Stummschaltung	14
Navigation	14
Startbildschirm	15
Anpassungsansichten	
Individuelle Anpassung	16
Equalizer	16
In Gesprächen verwenden	16
Im Lärm verwenden	17
Wind	17
Mikrofon Ausrichtung	18
SoundSpace	18
Ansicht des Thrive Scores	
Thrive Score Übersicht	19
Mentale Fitness	19

Inhaltsverzeichnis

Aktivitäts-Score	20
Sturzsensord und Sturzmeldung	21
Zubehör	23
IntelliVoice	23
Einstellungen	
Benutzerhandbuch	24
Geräteeinstellungen	24
Thrive Score	25
Sturzalarm	26
Sprachübersetzungen	27
Sprache-zu-Text	27
Selbsttest	28
Erinnerungen	28
Hearing Care Anywhere	30
Thrive Care App	31
Hörsysteme finden	32
App Einstellungen	32
Über	32
Demo Modus	33

Die Merkmale variieren je nach Produkt- und Technologieebene.
Diese App kann je nach Telefon- und/oder Hörsystemmodell leichte
Unterschiede aufweisen.

Thrive kompatible Hörsysteme



Oben sehen Sie die Hörsysteme aus dem Hause Starkey, welche mit der Thrive App zu bedienen sind.

Apple oder Android

Das Betriebssystem von Apple® (iOS) ist verantwortlich für die Verbindung zwischen Ihren Apple-Geräten und Thrive kompatiblen Hörsystemen. Die Thrive Hearing Control App ist eine Ergänzung zu Ihren Hörsystemen mit vielfältigen zusätzlichen Einstellmöglichkeiten. Mit der Thrive Hearing Control App können Sie Ihre Hörsysteme an Ihren Lebensstil anpassen.

HINWEIS ZU iOS-UPDATES: Beim Aktualisieren der iOS-Version auf Ihrem iPhone kann die Verbindung zu den Hörsystemen verloren gehen. Sie müssen die Hörsysteme dann entkoppeln und erneut mit Ihrem iPhone koppeln.

Aktuelle Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter www.starkey.de/hoergeraete/thrive-hearing/smartphone-kompatibilitaet

Thrive App für Apple Systeme herunterladen

Mit der Thrive App können Sie Ihre Hörsysteme ganz einfach mit Ihrem kompatiblen Apple-Gerät steuern und anpassen. Das Herunterladen der App ist einfach. Folgen Sie den nachstehenden Schritt-für-Schritt-Anweisungen:

Schritt eins: Öffnen Sie den App Store auf Ihrem Apple System



Schritt zwei: Geben Sie "Thrive Hearing Control" in dem Suchfeld ein.



Schritt drei: Klicken Sie auf "Laden" um die App zu installieren




Schritt vier: Öffnen Sie die Thrive App.




Verbindung mit Apple Systemen

Um die App zu verwenden, müssen Sie zunächst Ihre Hörsysteme mit Ihrem iOS-Endgerät koppeln.



1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® auf Ihrem iOS-Endgerät eingeschaltet ist. Schalten Sie im Einstellungsmenü Bluetooth auf An.
2. Öffnen und schließen Sie das Batteriefach an Ihren Hörsystemen oder entnehmen Sie die Akku-Hörsysteme aus der Ladestation. Dies versetzt die Hörsysteme in den Kopplungsmodus.

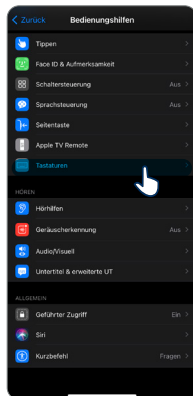

3. Wählen Sie dazu im Einstellungsmenü **Bedienungshilfen > MFi-Hörhilfen**
 - Wenn das iOS-Endgerät Ihre Hörsysteme erkennt, sehen Sie den Namen Ihrer Hörsysteme (z. B. „Florians Hörsysteme“).
- Wenn der Name nicht innerhalb von 5 – 7 Sekunden in der Liste „Geräte“ angezeigt wird, tippen Sie oben links auf Bedienungshilfen und anschließend auf MFi-Hörhilfen.

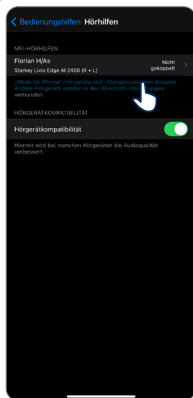

4. Tippen Sie auf den Namen der Hörsysteme, um Ihre Hörsysteme mit dem iOS-Endgerät zu verbinden.
5. Es folgen zwei Kopplungsanfragen (eine für jedes Hörsystem). Wählen Sie für beide Koppeln aus. Zwischen den beiden Anfragen können mehrere Sekunden vergehen.
6. Nach erfolgreicher Kopplung wechselt die Anzeige Ihres Hörsystemnamens von schwarz zu blau.

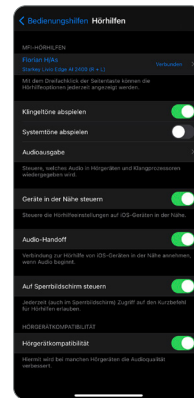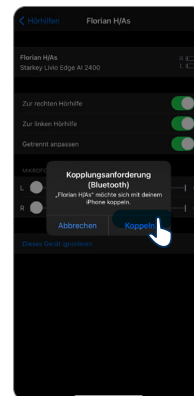

Ihre Hörsysteme erneut mit Ihrem Apple-Endgerät verbinden

Wenn Sie Ihre Hörsysteme oder Ihr Apple-Endgerät ausschalten, sind die Geräte nicht mehr miteinander verbunden. Zum erneuten Verbinden schalten Sie erst Ihr Apple-Endgerät und dann Ihre Hörsysteme ein.

Die Hörsysteme verbinden sich dann automatisch mit Ihrem Apple-Endgerät. Sie können auch den Bedienungshilfen-Kurzbefehl verwenden, um zu überprüfen, ob Ihre Hörsysteme erkannt wurden.

Thrive App für Android Systeme herunterladen

Mit der Thrive-App können Sie Ihre Hörsysteme ganz einfach mit Ihrem kompatiblen Android-Gerät steuern und anpassen. Das Herunterladen der App ist einfach. Folgen Sie den nachstehenden Schritt-für-Schritt-Anweisungen:

Schritt eins: Öffnen Sie bei kompatiblen Android Geräten den Google Play Store



Schritt zwei: Suchen Sie hier nach der "Thrive Hearing Control" App.

← Thrive Hearing Control Q

Schritt drei: Klicken Sie auf "Installieren" um die App herunterzuladen.

Installieren

Schritt vier:

Öffnen Sie die App auf Ihrem Android System.



Konnektivität für Android-Geräte

Folgen Sie dieser Anweisung um Ihr Hörsystem mit der App zu koppeln. Wenn Ihre Hörgeräte die Verbindung zu Ihrem Gerät verlieren, wiederholen Sie die unten stehenden Anweisungen.

1. Öffnen und schließen Sie das Batteriefach an Ihren Hörsystemen oder entnehmen Sie die Akku-Hörsysteme aus der Ladestation. Dies versetzt die Hörsysteme in den Kopplungsmodus.
2. Starten Sie die Thrive App.
3. Nach einem kurzen Suchvorgang sehen Sie die Hörsysteme in der App. HINWEIS: Jedes Hörsystem wird einzeln gelistet.
4. Markieren Sie das Kästchen und wählen Sie **Verbinden**

Verbinden Sie Ihre Hörsysteme wieder mit Ihrem Android-Gerät

Wenn Sie Ihre Hörsysteme oder Android-Geräte ausschalten, sind diese nicht mehr miteinander verbunden. Um die Verbindung wiederherzustellen, schalten Sie zuerst Ihr Android-Gerät ein und daraufhin Ihre Hörsysteme.


Die Hörsysteme werden automatisch mit Ihrem Android-Gerät verbunden. Wenn Sie Probleme haben, die Verbindung zwischen Ihren Hörsystemen und der App wiederherzustellen, überprüfen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Android-Gerät,

um sicherzustellen, dass Ihre Hörgeräte noch gekoppelt sind, und falls nicht, wiederholen Sie den Kopplungsvorgang.

Starten/Setup

Beim ersten Start der Thrive-Anwendung werden Sie aufgefordert, den Lizenzvertrag und die Datenschutzrichtlinie zu lesen und zu bestätigen sowie das Setup der Anwendung anzupassen. Sie haben die Möglichkeit, Benachrichtigungshinweise einzurichten und ein Cloud-Konto für z.B. die Hearing Care Anywhere Funktion einzurichten.

Die Thrive-Anwendung wird standardmäßig im erweiterten Modus betrieben. Der einfache Modus ist hingegen auf die wichtigsten Funktionen beschränkt, um die Bedienung zu erleichtern. Dies können Sie in den App-Einstellungen umändern.

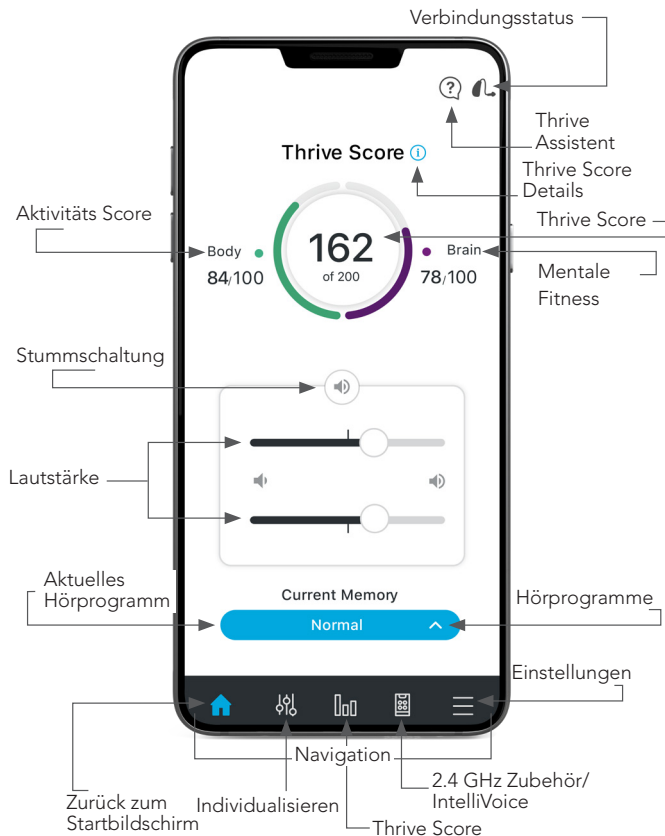

Die App kann sich leicht differenzieren, je nachdem, welches Smartphone Sie nutzen und welche Hörsystem-Technologie.

Einstellungen

Tippen Sie hier, um die Einstellungen des Menüs zu öffnen.

Thrive Assistant

Sie können jetzt in der Thrive Hearing Control App einen Sprachassistenten* nutzen, um Fragen zu stellen wie etwa "Wie kann ich die Einstellungen meines Hörsystems anpassen?" Der Thrive Assistant hört sich über das Mikrofon Ihres Telefons Ihre Frage an und stellt Ihnen als Antwort eine Hilfedatei bereit. Verfügbar für Edge AI 2400 und AI 2000/1600 Hörsysteme.

Find My Phone hilft Ihnen, Ihr verlorenes oder verlegtes Smartphone mit nur einem Doppelklick auf Ihre Edge AI 2400 oder AI 2000/1600 Hörsysteme zu finden. Verwenden Sie Sätze wie "Ich kann mein Telefon nicht finden" oder "Wo ist mein Telefon?"

Aktuelles Hörprogramm

Hier wird das aktuell verwendete Hörprogramm angezeigt.

Thrive Score

Ein Überblick über Mentale Fitness Score und Aktivitäts-Score. Diese Anzeige erscheint nur bei Verwendung von Livio AI Hörsystemen.

*Cloud Konto wird benötigt

Lautstärke


Erhöhen/reduzieren Sie die Lautstärke Ihrer Hörsysteme entweder getrennt mit den beiden Lautstärkeschiebern oder für beide Seiten zusammen durch Schieben auf der Fläche zwischen den Lautstärkeschiebern für linke und rechte Seite. Durch Doppeltippen auf die Fläche stellen Sie die Lautstärke auf den von Ihrem Hörakustiker eingestellten Standardwert zurück.

Stummschaltung

Durch Tippen auf diese Schaltfläche schalten Sie die Mikrofone an beiden Hörsystemen stumm. Erneutes Tippen hebt die Stummschaltung auf.

Navigation

Die Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand bietet Zugang zu den häufig verwendeten Abschnitten: Individualisieren, Thrive Score, Zubehör und Einstellungen.

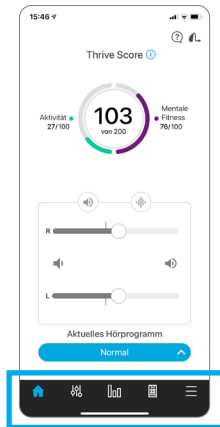

Startbildschirm


Durch Tippen auf das Startbildschirm-Symbol gelangen Sie zurück zur Startseite.

Anpassungsansichten

Durch Antippen von „Anpassen“ gelangen Sie zu einer Reihe von Einstellungsmöglichkeiten, mit denen Sie die Hörprogramme Ihrer Hörsysteme personalisieren können.


Equalizer

Mit den Equalizerbalken für verschiedene Frequenzbereiche können Sie das Klangbild anpassen, indem Sie die Steller verschieben. Der Klang kann für jedes Hörprogramm unterschiedlich eingestellt werden.

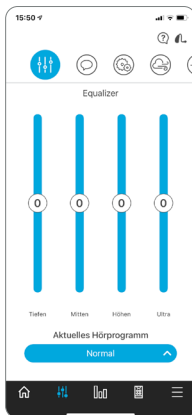


In Gesprächen verwenden

Mit der Funktion „In Gesprächen verwenden“ wird der Anteil der Hintergrundgeräusche in Ihren Hörsystemen reduziert. Sie kann für jedes Hörprogramm unterschiedlich eingestellt werden. Einstellungen weiter rechts sorgen für angenehmeres Hören in lauten Umgebungen. Der blaue Balken zeigt die aktuelle Einstellung an.

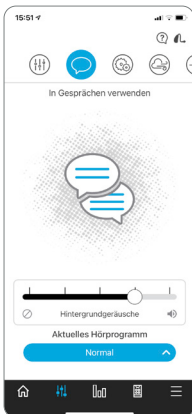


Im Lärm verwenden

Die Funktion „Im Lärm verwenden“ reduziert von Maschinen erzeugte Geräusche, um Ihnen das Hören in lauten Umgebungen zu erleichtern. Einstellungen weiter rechts sorgen für angenehmeres Hören in lauten Umgebungen. Der blaue Balken zeigt die aktuelle Einstellung an.

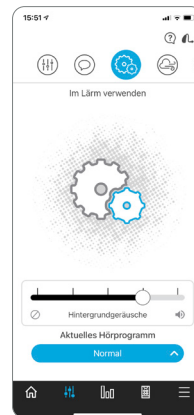

Wind

Mit der Funktion „Wind“ können Sie für jedes einzelne Hörprogramm die Windgeräusche an Ihren Hörsystemen reduzieren. Bei Einstellungen weiter rechts werden die Windgeräusche stärker gedämpft. Der blaue Balken zeigt die aktuelle Einstellung an.

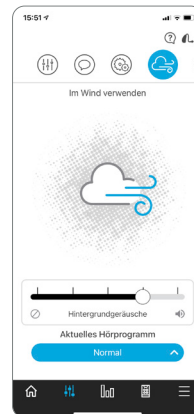


Mikrofon Ausrichtung

Mit der Funktion „Mikrofon Ausrichtung“ können Sie für jedes Hörprogramm die Geräusche in Ihrer Umgebung kontrollieren. Nutzen Sie diese Funktion, um Gesprächen besser folgen zu können, indem Sie z.B. das Mikrofon auf die Gespräche vor Ihnen ausrichten (Direktional).

SoundSpace

Mit der Funktion „SoundSpace“ können Sie Ihre persönlichen Einstellungen für Ihre Hörsysteme ganz einfach anpassen. Sie bietet die Möglichkeit, die Klangeinstellungen Ihrer Hörprogramme an die jeweilige Umgebung anzupassen. Wenn Sie mit dem Finger über das Display wischen, ändern sich vorübergehend die Einstellungen Ihrer Hörsysteme, sodass Sie sich unterschiedliche Optionen anhören können.

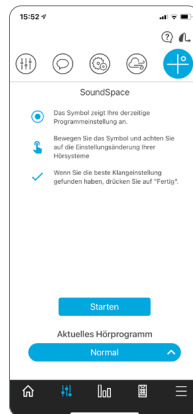

Thrive Score Übersicht*

Gesamt zeigt den Thrive Wellness Score an, eine Kombination aus Mentale Fitness Score und Aktivitäts-Score. Sie können täglich einen Score von 200 erreichen.


Mentale Fitness**

Der Tracker für Mentale Fitness besteht aus drei Segmenten. Die Punktwertungen der drei Segmente geben wieder, wie Sie Ihre Hörsysteme nutzen. Die Thrive Hearing Control App wertet die Nutzungsdaten Ihrer Hörsysteme aus und zeigt Ihren täglichen Fortschritt an. Ihr Ziel sind 100 Punkte pro Tag.

Nutzung: Punkte für die Nutzung sammeln Sie, indem Sie Ihre Hörsysteme regelmäßig tragen. Je häufiger Sie die Hörsysteme nutzen, desto mehr Punkte sammeln Sie (maximal 40).

Interaktion: Punkte für die Interaktion sammeln Sie, indem Sie Ihre Hörsysteme für soziale Interaktion verwenden. Je mehr Zeit Sie in Umgebungen mit Gesprächen verbringen, desto mehr Punkte sammeln Sie (maximal 40).

Hörumgebungspunkte sammeln Sie, wenn sich die Hörsysteme in akustisch anspruchsvollen Hörsituationen tragen (maximal 20).

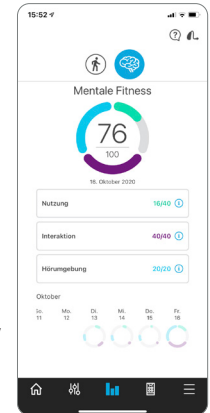

*Ab der AI 1000 Technologiestufe.

**Für Edge AI 2400 und AI 2000/1600/1200 Hörsysteme.

Aktivitäts Score*

Der Aktivitäts Score setzt sich aus den Fortschritten von drei täglichen Zielen für körperliche Aktivität zusammen. Das Erreichen aller drei Ziele ergibt 100 Punkte. Die Hörsysteme tracken Ihre Schritte und übertragen diese Daten an die App. In den Einstellungen können Sie Ihre Ziele festlegen oder ändern.


Schritte zeigt Ihren Fortschritt im Hinblick auf Ihr tägliches Schrittziel (40 Punkte möglich).

Übung zeigt Ihren Fortschritt im Hinblick auf Ihr tägliches Aktivitätsziel (40 Punkte möglich).

Stehen zeigt Ihren Fortschritt im Hinblick auf Ihr Bewegungsziel, stündlich aufzustehen und sich zu bewegen (20 Punkte möglich).

HINWEIS: Die Hörsysteme müssen im Laufe des Tages regelmäßig mit dem Smartphone verbunden werden und die Thrive Hearing Control App muss im Hintergrund laufen.

HINWEIS: Hörsysteme müssen mit dem Smartphone verbunden sein.

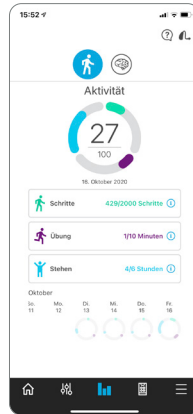

Sturzsensor und Sturzmeldung*

Die Funktion „Sturzalarm“ kann verwendet werden, um bei einem Sturz oder einem anderen Vorfall eine Sturzmeldungs-SMS mit Ihren Standortdaten an die von Ihnen festgelegten Kontaktpersonen zu senden. Die Sturzmeldung kann so konfiguriert werden, dass sie automatische und/oder manuell ausgelöste Sturzmeldungen verschickt.


Bei aktiviertem automatischen Sturzalarm erkennen die Sensoren in Ihren Hörsystemen einen Sturz automatisch.

Bei aktiviertem manuellen Sturzalarm können Sie den Benutzersteller an einem der Hörsysteme drücken, um eine Sturzmeldungs-SMS auszulösen.

Die Thrive App löst eine Sturzmeldungs-SMS aus, wenn automatisch ein Sturz erkannt wird oder sie manuell eine Sturzmeldung auslösen.

HINWEIS: Hörsysteme müssen mit dem Smartphone verbunden sein

**Für Edge AI 2400 Hörsysteme.*

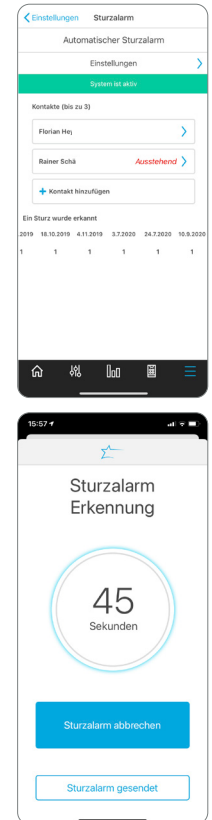

*Ab der AI 1000 Technologiestufe.

Die SMS wird an bis zu drei festgelegte Kontaktpersonen gesendet, die den Erhalt der Nachricht bestätigen und eine Karte mit Ihrem Standort aufrufen können (vorher muss die GPS-Freigabe erfolgen).

Mit Sturzalarm abbrechen können Sie eine automatische Sturzmeldung oder manuelle Sturzmeldung an Ihren Hörsystemen oder Ihrem Smartphone abbrechen. Um eine Sturzmeldungs-SMS an Ihren Hörsystemen abbrechen, drücken Sie den Benutzersteller an einem der Hörsysteme. Sie werden in der Thrive Hearing Control App und mit einer Sprachansage in Ihren Hörsystemen über den Abbruch informiert. Sturzmeldungs-SMS können innerhalb der eingestellten Abbruchzeit von 60 oder 90 Sekunden nach der Auslösung der Sturzmeldung abgebrochen werden.

Unter Kontaktpersonen können Sie bis zu drei Kontaktpersonen festlegen, an jene die Sturzmeldungs-SMS gesendet werden soll. Sie müssen für jede Kontaktperson den Namen und die Smartphone-Nummer in die Thrive Hearing Control App eintragen. Die Kontaktpersonen erhalten daraufhin eine SMS mit der Aufforderung, die Teilnahme an Ihrem Sturzmeldungssystem zu bestätigen. Erst nach diesem Schritt erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Hinweis:



Der Sturzdetektor- und Alarm sind lediglich ein Tool, welches die Information an einen oder mehrere Kontakte sendet, die der Benutzer selbst bestimmt hat. Die Thrive-App kommuniziert nicht mit Rettungsdiensten und ist kein Ersatz für die Kontaktaufnahme mit professionellen Rettungsdiensten. Eine Auslösung des Alarms kann nicht gewährleistet werden.

Zubehör

Die Thrive Hearing Control App bietet die Möglichkeit, die Audioübertragung von Zubehörgeräten wie Starkey Hearing Technologies TV, Remote Microphone +. Konferenzmikrofon und Mini Remote Microphone zu steuern. Diese Zubehörgeräte werden direkt mit Ihren Hörsystemen gekoppelt. In der App können Sie ein gekoppeltes Zubehörgerät auswählen, die Audioübertragung starten und stoppen und die Lautstärke von Übertragung und Umgebungsgläuschen regeln.

IntelliVoice* kombiniert die Vorteile eines Smartphones mit einem Hörsystem und künstlicher Intelligenz. Der Vorteil ist eine leistungsfähigere und flexiblere Sprachanhebung in den anspruchsvollsten Hörumgebungen für Kunden mit einem hochgradigem Hörverlust. Fragen Sie Ihren Hörakustiker nach weiteren Informationen.

**Für Edge AI Hörsysteme; nur für Apple-Systeme*

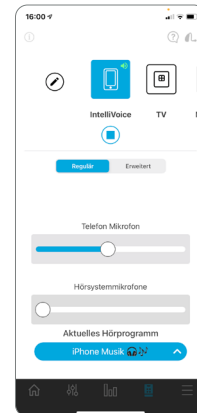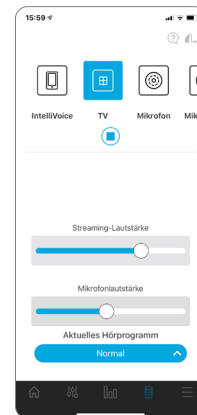

Benutzerhandbuch

In der Thrive Hearing Control App ist für jede Ansicht/Funktion eine Übersicht verfügbar, in der die Einzelheiten der Ansicht sowie alle Funktionen erläutert werden.

Geräteeinstellungen

Erweiterte Einstellungen für Ihre Hörsysteme können in diesem Bereich ein-/ausgeschaltet oder eingestellt werden.

Mit der **Tipp-Steuerung*** können Sie die Tipp-Geste aktivieren oder deaktivieren, die Empfindlichkeit einstellen und die Funktion wählen, die durch die Tipp-Geste aktiviert werden soll (Thrive-Assistent**, Zubehör Start/Stop Streaming oder Edge-Modus***).

Der **Thrive-Assistent**** bietet Ihnen die Möglichkeit, mit Ihrer Stimme fragen zu Thrive zu stellen, allgemeine Fragen zu stellen, die aus dem Internet beantwortet werden (wenn Sie angemeldet sind), Ihren Hörsystemen zu befehlen, Änderungen am Hörprogramm oder an der Lautstärke vorzunehmen oder eine Erinnerung zu setzen. Beispiele für Sprachsteuerung: "mein Hörprogramm auf Restaurant ändern" oder "eine Erinnerung setzen, mein Rezept morgen um 3:00 Uhr abzuholen".

Mit dem **Edge-Modus***** können Sie eine automatische Bewertung der aktuellen Hörumgebung auslösen. Ihre Edge AI Hörsysteme wählen dann mithilfe von künstlicher Intelligenz eine für Sie optimierte

**Ab der AI 1000 Technologiestufe*

***Ab der AI 1600 Technologiestufe*

****Für Edge AI Hörsysteme*

Einstellung für die jeweilige Hörsituation.

Diese Einstellungen bleiben erhalten, bis Sie Ihr Hörprogramm ändern oder Ihre Hörsysteme neu starten.

Mit **Auto-Streaming** können Ihre Hörsysteme erkennen, wenn ein Audiostreaming startet, und automatisch in ein anderes Hörprogramm und eine andere Mikrofonabsenkung wechseln, die beide für das Audiostreaming optimiert sind.

Mit **Comfort Boost** senken Ihre Hörsysteme Störgeräusche stark ab und optimieren die Klangqualität in lauten Umgebungen. (Comfort Boost kann über die App als Programm aktiviert werden).

Bei **aktivierten Hinweistönen** spielen die Hörsysteme bei Erhalt von bestimmten Telefonbenachrichtigungen wie Kalenderterminen, E-Mails und Social-Media-Nachrichten ein akustisches Signal ab.

Thrive Score*

Die Einstellungen für den Thrive Score. Hier können Sie Ihre persönlichen Daten hinzufügen oder aktualisieren, um die Genauigkeit des Schritte-Trackings zu verbessern. Außerdem können Sie Ziele für Schritte, Aktivität und Bewegung festlegen/verändern.

**Ab der AI 1000 Technologiestufe*

Sturzalarm*

Unter **Einstellungen** können Sie die **Empfindlichkeit**, des Sturzdetektors in der Thrive Hearing Control App einstellen, diese können höher oder niedriger eingestellt werden. Die Erhöhung der Empfindlichkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sturz erkannt wird. Das Absenken der Empfindlichkeit kann die Wahrscheinlichkeit von falschen Sturzmeldungen verringern, jedoch auch ein Auslösen verhindern.

Unter **Profil** können Sie Ihre persönlichen Informationen bearbeiten.

Unter **Hinweistöne** für den automatische Sturzalarm und manuellen Sturzalarm können Sie die Sprachansagen für die Sturzmeldung anhören, um im Bedarfsfall mit ihnen vertraut zu sein.

Unter **Kontakte** können Sie Kontaktpersonen hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Unter **Stornierungs-Timer** können Sie 60 oder 90 Sekunden Wartezeit bis zum Senden der Sturzmeldungs-SMS auswählen.

Unter **Warnmeldung** können Sie Ihren Namen bearbeiten und ein Beispiel einer Sturzmeldungs-SMS anzeigen.

*Für Edge AI Hörsysteme.

Sprachübersetzung*


Bei der Funktion „Sprachübersetzung“ können Sie Ihre Sprache und die Sprache Ihres Gesprächspartners auswählen. Wenn Sie in das Telefon sprechen, übersetzt die App das Gesagte von Ihnen und zeigt die Übersetzung als Text an. Wenn Ihr Gesprächspartner spricht, wird der Text übersetzt, als Textform angezeigt und ggf. hören Sie die Übersetzung in Ihren Hörsystemen (für Smartphones, welche Direkt-Streaming ermöglichen).

Sprache-zu-Text**

Die Funktion „Sprache-zu-Text“ liefert Ihnen Untertitel im echten Leben. Wenn Sie oder andere Personen in das Telefon sprechen, transkribiert die App den Text und zeigt ihn auf dem Display an. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den transkribierten Text zu speichern, zu kopieren oder per Messenger oder E-Mail zu versenden.

*Für Edge AI Hörsysteme.

**Für Edge AI 2400 und AI 2000 Hörsysteme.

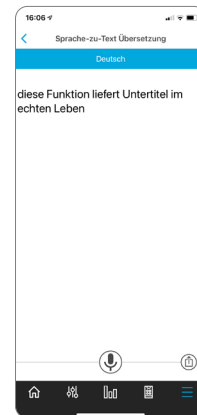


Selbsttest

Der Selbsttest bietet Ihnen eine schnelle und bequeme Möglichkeit, die Leistung Ihrer Hörsysteme selbstständig zu analysieren.

Mit dem Selbsttest können Sie die Leistung der Komponenten in Ihrem(n) Hörsystem(en) einschließlich der Mikrofone, Hörer, der Schaltung und der Sensoren diagnostizieren.

Der Selbsttest zeigt Ihnen bei Bedarf Anweisungen zur Wartung (die meisten Probleme sind auf Cerumen zurückzuführen und können leicht behoben werden). Funktion muss von Ihrem Hörakustiker freigeschaltet werden.

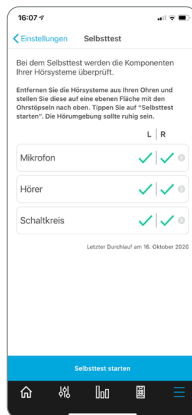



Erinnerungen*

Die Funktion "Erinnerungen" kann Ihnen helfen, wichtige Aufgaben und Termine in Ihrem geschäftigen Leben im Auge zu behalten, ohne sich an alle erinnern zu müssen. Sie können visuelle Erinnerungsbenachrichtigungen

*Für Edge AI 2400, AI 2000/1600 Hörsysteme.

auf Ihrem Smartphone einrichten und empfangen und/oder akustische Erinnerungsbenachrichtigungen, z. B. die Einnahme von Medikamenten, Rezept erneuern, die Reinigung Ihrer Hörsysteme, Sport und die Erinnerung genügend zu trinken. Nachdem Sie den Namen, das Datum und die Uhrzeit der Erinnerung festgelegt haben, können Sie die Option auswählen, dass diese Erinnerung täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholt wird.

Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, wenn Sie die Aufgabe nicht in dem Moment erledigen können, denn überfällige Aufgaben werden auf dem Bildschirm "Erinnerungen" in rot angezeigt, bis Sie sie abhaken.

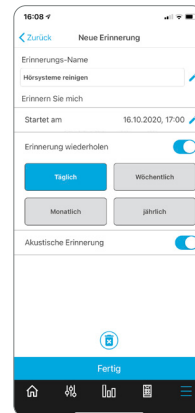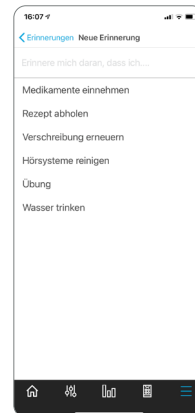

Hearing Care Anywhere

Ein Konto einrichten


Um Hearing Care Anywhere zu nutzen, müssen Sie ein Cloud-Konto einrichten. Über dieses Konto können die Daten Ihrer Hörsysteme gesichert und mit Ihren Smartphones synchronisiert werden. Die Möglichkeit besteht, sich mit Ihrem Facebook- oder Google-Konto anzumelden oder auch mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort Ihrer Wahl.

Datensicherung

Wenn Sie Änderungen in der Thrive Hearing Control App vornehmen, werden diese Änderungen in Echtzeit in Ihrem Cloud-Konto gesichert.

Fernprogrammierung

Die Fernprogrammierung kann von Ihrem Hörakustiker aktiviert werden. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne einen Vor-Ort-Besuch beim Hörakustiker, Anpassungen und Hilfe bei der Feinabstimmung Ihrer Hörsysteme anzufordern. Die Hörsysteme können über das Internet über eine sichere Verbindung von Ihrem Hörakustiker eingestellt werden.

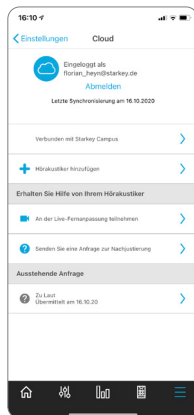

Kundenbewertungen


Wenn Sie über Hearing Care Anywhere Fernprogrammierungen von Ihrem Hörakustiker anfordern und erhalten, können Sie Ihre Zufriedenheit mit den vorgeschlagenen Änderungen bewerten. Sie werden aufgefordert, das Ergebnis zu bewerten. Diese Bewertung wird an Ihren Hörakustiker gesendet, um diesem bei der optimalen Anpassung Ihrer Hörsysteme zu helfen.



Thrive Care App*

Die Thrive Care App* bietet denjenigen, mit denen Sie hilfreiche Informationen austauschen möchten, ein beruhigendes Gefühl und hilft Ihnen, sich selbstbewusst und unabhängig zu fühlen.


Mit Thrive Care können Sie Informationen wie körperliche Aktivität, Nutzung von Hörsystemen, soziales Engagement und mehr mit Ihren Betreuern oder Angehörigen teilen.

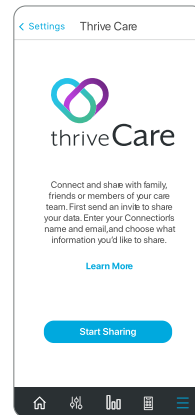

*Für Edge AI Hörsysteme.

Hörsysteme finden

Mit der Funktion „Hörsysteme finden“ können Sie den letzten bekannten Standort Ihrer Hörsysteme auf einer Karte verfolgen. Wenn Sie die Funktion „Hörsysteme finden“ aufrufen, sehen Sie eine Karte, auf der der letzte Standort markiert ist, an dem Ihre Hörsysteme mit der App verbunden waren. Wenn Ihre Hörsysteme aktuell verbunden sind (oder verbunden werden), zeigen die animierten Balken unter der Karte an, wie weit Sie von Ihren Hörsystemen entfernt sind.

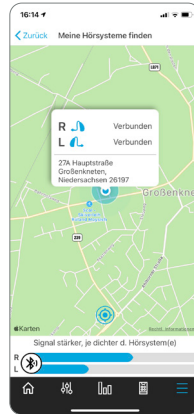

App Einstellungen

Unter „App-Einstellungen“ können Sie den Modus „Erweiterter Modus“ auswählen oder deaktivieren. Im erweiterten Modus sind alle Funktionen der App verfügbar.

Bei einer Deaktivierung wird automatisch der einfache Modus aktiviert. Dieser ist auf die wichtigsten Funktionen beschränkt, um die Bedienung zu erleichtern.

Über

Dieses Menü enthält Informationen über Starkey Hearing Technologies, den Endbenutzer-Lizenzvertrag, Datenschutzrichtlinie und die App-Version. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, eine Rückmeldung zu senden.

Demomodus

Setzt die App in einen Demomodus, in welchen Sie die App ohne Hörsysteme simulieren können.

[illegible][illegible]

Informationen zur Kompatibilität von Livio AI, Livio, der Thrive Hearing Control App und iOS/Android finden Sie unter <https://www.starkey.de/hoergeraete/thrive-hearing/smartphone-kompatibilitaet>.

Die Verwendung des „Made for Apple“-Emblems bedeutet, dass ein Zubehörgerät speziell für den Anschluss an die im Emblem gekennzeichneten Apple-Produkte entwickelt wurde und vom Entwickler nach den Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist für den Betrieb dieses Geräts sowie die Einhaltung von gesetzlichen und Sicherheitsstandards nicht verantwortlich. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind Handelsmarken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind. App Store ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung solcher Marken durch Starkey erfolgt unter Lizenz.



Starkey.de

6700 Washington Ave. S.
Eden Prairie, MN 55344
1.800.328.8602



Starkey Laboratories
(Deutschland) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg, Deutschland

