

Guía de usuario de la aplicación Control Auditivo Thrive

Felicitaciones por su camino
a una mejor audición

thrive



Aplicación Control Auditivo Thrive

Tabla de contenido

Introducción	4
Usuarios de Apple	
Emparejando/Conectando	5
Descargando	8
Usuarios de Android	
Descargando	9
Emparejando/Conectando	10
Pantalla de inicio	
Estado de la conexión	13
Thrive Assistant	13
Puntaje de bienestar	13
Memoria actual	13
Ajustes/Ayuda	13
Volumen	14
Silenciar	14
Edge Mode	14
Navegación	15
Inicio	15
Menú de memoria	15
Personalizar pantallas	
Personalizar pantallas	16
Ecuador	16
Habla en ruido	16
Ruido de máquina	17
Viento	17
Dirección del micrófono	18
SoundSpace	18

Tabla de contenido

Pantallas de Puntaje de bienestar	
Descripción general	19
Interacción	19
Actividad	20
Detección y alertas de caída	21
Accesorios	23
IA de voz	23
Ajustes	
Guía del usuario	24
Ajustes del dispositivo	24
Puntaje de bienestar	25
Alerta de caída	26
Traducir	27
Transcribir	27
Auto Revisión	28
Recordatorios	28
Programación remota TeleHear	30
Aplicación Thrive Care	31
Encontrar mis audífonos	31
Ajustes de la aplicación	32
Acerca de	32
Modo de demostración	32
Información sobre seguridad	33

Todas las características varían según el modelo de audífono y el nivel de tecnología. Pregúntele a su profesional de la audición para obtener información específica.

Esta aplicación puede tener ligeras diferencias según su teléfono y/o modelo de audífono.

Audífonos compatibles con Thrive



Arriba se muestran los audífonos de 2,4 GHz de la plataforma Thrive que funcionan con la aplicación Control Auditivo Thrive.

Apple o Android

El sistema operativo iOS o Android es el responsable de administrar la conectividad entre sus dispositivos Apple o Android y los audífonos compatibles con Thrive. La aplicación Control Auditivo Thrive es un complemento de sus audífonos que ofrece una variedad de capacidades de ajuste mejoradas. Con Thrive, puede personalizar sus audífonos para que se adapten a su estilo de vida.



NOTA DE ACTUALIZACIÓN DE iOS: Al actualizar la versión de iOS en su iPhone, los audífonos pueden perder la conexión, lo que requiere que los desvincule y vuelva a vincularlos con su iPhone.

Para obtener la información de compatibilidad más actualizada, visite starkey.com/thrivesupport

Conectividad para dispositivos Apple



Para utilizar la aplicación Thrive, primero debe vincular sus audífonos con su dispositivo iOS.

1. Asegúrese de que el Bluetooth® está activado en su dispositivo iOS. En el menú de configuración, vaya a Bluetooth y cambie a **Encendido**.
2. Apague y vuelva a encender sus audífonos. Esto pone a los audífonos en modo de emparejamiento.
3. En el menú Ajustes, vaya a **Accesibilidad** > **Dispositivos auditivos**.
 - Verá el nombre de su audífono (p.ej. "Audífonos de Cris") cuando el dispositivo iOS detecta sus audífonos por primera vez.
 - Si su nombre no aparece en la lista de "Dispositivos" en un plazo de 5–7 segundos, toque **Accesibilidad** en la esquina superior izquierda y, a continuación, toque **Dispositivos auditivos**.

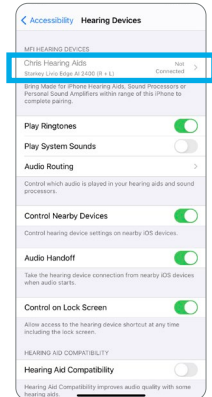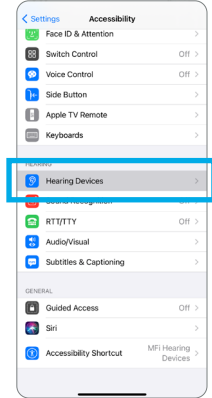

4. Toque el nombre del audifono para conectar cada los audifonos al dispositivo iOS.
5. Verá dos solicitudes de emparejamiento (una para cada audifono). Seleccione **Emparejar** para cada solicitud. Estas solicitudes pueden aparecer con varios segundos de diferencia.
6. Cuando se complete el emparejamiento, el nombre de su audifono cambiará de negro a azul.

Ahora está listo para usar su dispositivo iOS para ajustar su audifono. Puede ajustarlo con los controles nativos de iOS o con la aplicación Thrive.

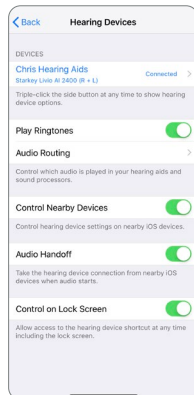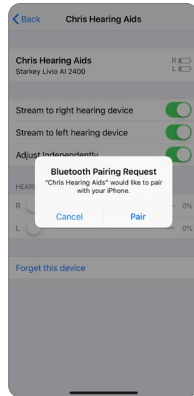

Reconexión de sus audifonos a su dispositivo Apple

Cuando apague sus audifonos o el dispositivo Apple, ya no estarán conectados entre sí. Para volver a conectarlos, encienda su dispositivo Apple y luego encienda sus audifonos.

Los audifonos se conectarán automáticamente a su dispositivo Apple. También puede verificar esta conexión accediendo al acceso directo de Accesibilidad haciendo clic tres veces en el **botón Inicio** (iPhone 8 o anterior) o en el botón lateral (iPhone X y posterior) en su dispositivo iOS.

Descarga la aplicación Thrive para dispositivos Apple

La aplicación Thrive facilita el control y el ajuste de sus audífonos con su dispositivo Apple compatible. Descargar la aplicación es fácil. Siga las instrucciones paso a paso a continuación:

Paso uno: En un dispositivo Apple compatible, abra la "App Store".



Segundo paso: Ingrese "Control Auditivo Thrive" en el campo de búsqueda.



Paso tres: Toque "OBTENER" para descargar la aplicación en su dispositivo. Siga las indicaciones de la pantalla para configurar la aplicación.

OBTENER

Paso cuatro: Una vez que la aplicación se haya instalado, abra la aplicación Thrive desde su pantalla de inicio o lista de aplicaciones.



Descarga la aplicación Thrive para dispositivos Android

La aplicación Thrive facilita el control y el ajuste de sus audífonos con su dispositivo Android compatible. Descargar la aplicación es fácil. Siga las instrucciones paso a paso a continuación:

Paso uno: En un Android compatible, abra "Google Play Store".



Segundo paso: Ingrese "Control Auditivo Thrive" en el campo de búsqueda.



Paso tres: Toque "OBTENER" para descargar la aplicación en su dispositivo. Siga las indicaciones de la pantalla para configurar la aplicación.

OBTENER

Paso cuatro: Una vez que la aplicación se haya instalado, abra la aplicación Thrive desde su pantalla de inicio o lista de aplicaciones.



Conectividad para dispositivos Android

Siga las instrucciones a continuación para conectar sus audífonos a su dispositivo Android. Si sus audífonos pierden la conexión con su dispositivo, repita las instrucciones a continuación para volver a conectarse.

1. Toque el icono de Ajustes en su dispositivo.
2. Asegúrese de que Bluetooth está encendido.
3. Apague y vuelva a encender sus audífonos. Esto pone a los audífonos en modo de emparejamiento.
4. Inicie la aplicación Thrive y siga las indicaciones.
5. Cuando se detecte el par de audífonos, se le pedirá que empareje cada uno de ellos junto con una indicación más para permitir que la aplicación Thrive gestione sus audífonos.
6. Si se detecta más de un par de audífonos, verá una lista; toque para seleccionar y conectar el suyo.

NOTA: El emparejamiento se puede completar a través del menú Bluetooth de su dispositivo Android, si lo prefiere.

Reconexión de sus audífonos a su dispositivo Android

Cuando apague sus audífonos o el dispositivo Android, dejarán de estar conectados entre sí. Para volver a conectarlos, encienda su dispositivo Android y luego encienda sus audífonos.

Los audífonos se conectarán automáticamente a su dispositivo Android. Si tiene problemas para volver a conectar sus audífonos y su aplicación, verifique la configuración de Bluetooth en su dispositivo Android para asegurarse de que sus audífonos todavía están emparejados y, si no es así, repita el proceso de emparejamiento.

Inicio/Configuración

Después de iniciar la aplicación Thrive por primera vez, se le pedirá que lea y acepte el acuerdo de licencia y la política de privacidad, así como que personalice la configuración de la aplicación. Tendrá la opción de configurar alertas de notificación y de configurar una cuenta en la nube para la función de programación remota TeleHear. La aplicación Thrive estará predeterminada en el modo Avanzado; puede elegir configurar el modo Básico después de la instalación a través del menú Ajustes.



Esta aplicación puede tener ligeras diferencias según su teléfono y/o modelo de audífono.

Estado de la conexión

Toque para ver el estado de conexión actual de sus audífonos.

Thrive Assistant*

Con Thrive Assistant, puede activar un asistente de voz dentro de la aplicación Thrive para responder preguntas o responder a comandos. Thrive Assistant se puede activar mediante un icono en la aplicación Thrive o con un doble toque en sus audífonos. Puede usar su voz para hacer preguntas sobre Thrive, hacer preguntas generales que se responden desde Internet (si ha iniciado sesión), ordenar a sus audífonos que realicen cambios en la memoria o el volumen, crear un recordatorio o incluso encontrar su teléfono. Ejemplos de comando de voz: "Cambiar memoria a Restaurante" o "establecer un recordatorio para recoger mi receta mañana a las 3:00" o "¿dónde está mi teléfono?"

Puntaje de bienestar

Una vista tanto de la interacción como del seguimiento de la actividad.

Memoria actual

Aquí se muestra la memoria actual que está utilizando.

Ajustes

Toque para abrir el menú. Consulte la sección Ajustes para obtener una descripción completa.

La función de **Ayuda** explica la función de cada pantalla disponible. Todos los archivos de ayuda se pueden encontrar en [Ajustes > Guía del usuario](#).

*Requiere una cuenta en la nube.

Volumen


Aumente/disminuya el nivel de volumen de sus audífonos deslizando el control de volumen a cada lado o usando el panel deslizante (entre los controles de volumen izquierdo y derecho) para ajustar ambos lados simultáneamente. Toque dos veces en cualquier lugar del panel deslizante para devolver el volumen al nivel predeterminado establecido por su profesional de la audición.

Silenciar

Toque el botón Silenciar para silenciar los micrófonos de ambos audífonos. Vuelva a tocarlo para activar el sonido de los audífonos.


Edge Mode

Al tocar el icono Edge Mode se puede activar una evaluación automática del entorno actual de escucha. Sus audífonos AI crearán ajustes optimizados para usted en función de las características de ese entorno en particular. El Edge Mode se puede activar (si está configurado) mediante un control de usuario en su audífono, o bien a través del botón Edge Mode en la pantalla de inicio. Estos ajustes estarán vigentes hasta que modifique las memorias o reinicie sus audífonos.

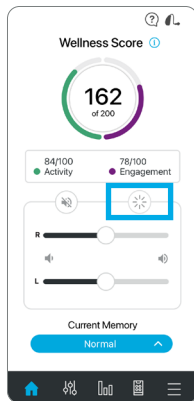

Navegación

La barra de Navegación en la parte inferior de la pantalla brinda acceso a las secciones de uso común Personalizar, Puntaje Thrive, Accesorios y Ajustes.

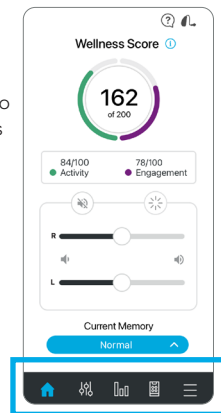


Inicio

Toque el icono de Inicio en la barra de navegación para volver a la pantalla principal.

Menú de memoria

Toque el icono Menú de memoria para ver y seleccionar de las memorias disponibles o para crear una nueva memoria o editar una memoria.

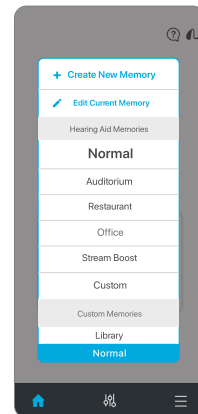


Personalizar pantallas

Toque Personalizar en la barra de navegación para acceder a una variedad de controles de ajuste para personalizar las memorias de sus audífonos.


Ecuador

Personalizar brinda barras de ecualización para varios rangos de frecuencia. Puede deslizar hacia arriba/abajo para ajustar su calidad de sonido preferida. Puede ajustar cada memoria de forma diferente.

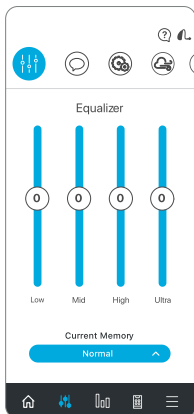


Habla en ruido

Habla en ruido reduce la cantidad de ruido de fondo que llega a sus audífonos. Puede ajustarlo individualmente para la memoria de cada uno de los audífonos. Ajustarlo completamente a la derecha brinda más comodidad en situaciones de ruido.

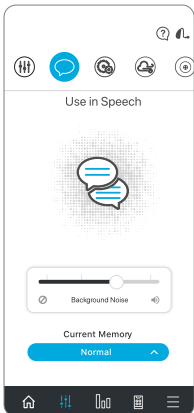


Ruido de máquina

Ruido de máquina reduce los sonidos producidos por maquinarias para aumentar su comodidad en ambientes ruidosos. Ajustarlo completamente a la derecha brinda más comodidad en situaciones de ruido.

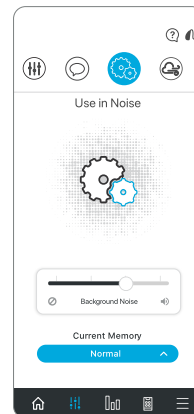


Viento

Viento le brinda control para reducir el ruido del viento que sopla a través de los micrófonos de sus audífonos, individualmente por cada memoria. Ajustarlo completamente a la derecha brinda más comodidad en ambientes con viento.

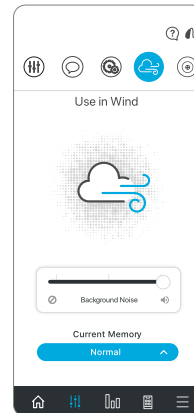


Dirección del micrófono

La dirección del micrófono brinda la capacidad de controlar el sonido a su alrededor en cada memoria. Utilice esta opción para mejorar su capacidad para escuchar una conversación al dirigir el micrófono hacia los sonidos que están frente a usted. El modo automático sigue los sonidos del habla según los niveles de ruido.

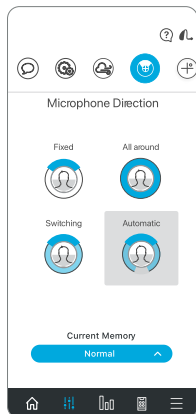

SoundSpace

SoundSpace le permite convertir su dispositivo iOS en una herramienta de ajuste de configuración personal para sus audífonos. Brinda la capacidad de modificar la respuesta de cualquiera de sus memorias Thrive personalizadas para adaptarse mejor a un ambiente en particular. A medida que mueve el dedo por la pantalla en blanco, los ajustes de sus audífonos cambiarán temporalmente para que pueda escuchar una variedad de opciones.

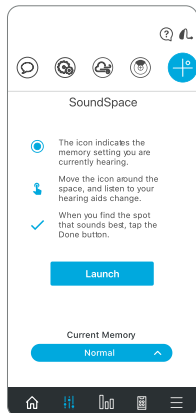

Puntaje de bienestar


Descripción general El Puntaje de bienestar es una combinación de puntajes tanto de Interacción como de Actividad. Tiene la capacidad de alcanzar una puntuación de 200 cada día.

El seguimiento del **Interacción** se compone de tres segmentos. Cada segmento tiene un valor en puntos para reflejar cómo está usando sus audífonos. La aplicación Thrive lee los datos de uso de sus audífonos y muestra sus puntos de progreso diarios. Su objetivo es 100 puntos por día.

El puntaje de **Uso** se obtiene usando sus audífonos a diario. Cuanto más los use, más puntos ganará (40 posibles).

El puntaje de **Interacción** se obtiene al usar sus audífonos para interactuar con los demás. Cuanto más tiempo pase en ambientes con habla conversacional, más puntos ganará (40 posibles).

Los puntos de **Ambiente** se obtienen cuando los audífonos se adaptan a ambientes auditivos complejos (20 posibles).

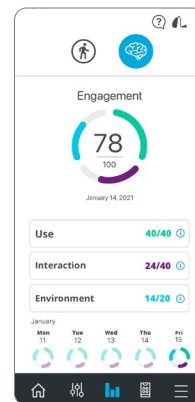


El seguimiento de la **Actividad** se compone del progreso hacia tres objetivos diarios de actividad física. Cumplir los tres objetivos proporcionará 100 puntos en total. El audifono rastrea los pasos y esos datos se transmiten a la aplicación a lo largo del día. Puede establecer/modificar objetivos en el área de Ajustes.

Pasos muestra su progreso hacia el objetivo de conteo de pasos diario (40 puntos posibles).

Ejercicio muestra su progreso hacia su objetivo diario de ejercicio vigoroso (40 puntos posibles).

Levantarse muestra su progreso hacia su objetivo de movimiento para ponerse de pie y moverse cada hora (20 puntos posibles).

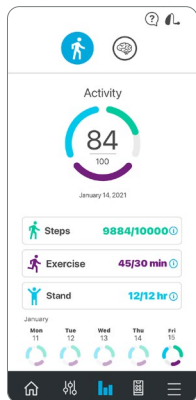

NOTA: Los audifonos deben conectarse regularmente al teléfono durante el día y la aplicación Thrive debe mantenerse abierta en segundo plano en su teléfono.



Detección y alertas de caída

La función de Alerta de caída se puede utilizar para enviar un mensaje de texto de alerta a sus contactos designados que contenga su ubicación GPS en caso de que se caiga o sufra un incidente no relacionado con caídas. La Alerta de caída puede configurarse para que se envíen alertas de manera automatizada o manualmente.


Alerta automática permite que los sensores de sus audifonos detecten una caída automáticamente.

Alerta manual permite “presionar y mantener presionado” el control del usuario en cualquiera de los audifonos para iniciar un mensaje de texto de alerta.

Se iniciará un mensaje de texto de alerta cuando la aplicación Thrive detecte automáticamente una caída o cuando lo haga usted manualmente. El mensaje de texto se enviará a un máximo de tres contactos predefinidos, quienes podrán confirmar la recepción del mensaje y ver un mapa que indica su ubicación.

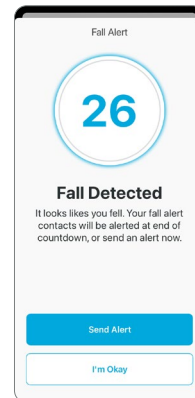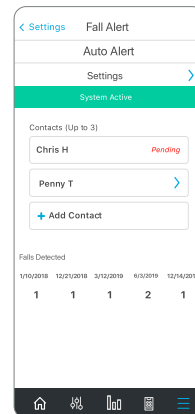


Cancelación de alerta permite cancelar una alerta automática o una alerta manual desde sus audífonos o su teléfono inteligente. Para cancelar un mensaje de texto de alerta desde su audífonos, presione el control de usuario en cualquiera de los audífonos. Para cancelar desde su teléfono inteligente, toque “Estoy bien” (I’m Okay) en la aplicación Thrive. Se le informará de la cancelación en la aplicación Thrive y mediante un indicador de voz a través de sus audífonos. Los mensajes de alerta de caída se pueden cancelar en un plazo de 60 ó 90 segundos de tiempo de cancelación preseleccionado después de iniciarse la alerta.

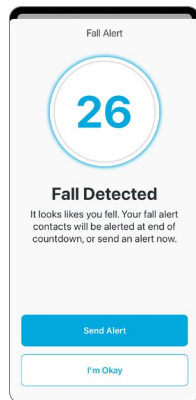


Contactos permite identificar hasta tres contactos a los que le gustaría enviar mensajes de texto de alerta. Debe introducir el nombre y el número de teléfono de cada contacto en la aplicación Thrive. Cada uno de sus contactos recibirá un mensaje de texto que le solicitará confirmar su participación en el sistema de alertas de caída.

Accesorios

La aplicación Thrive brinda la capacidad de controlar la transmisión de audio desde la mayoría de los accesorios de 2.4 GHz. Estos accesorios se emparejan directamente con sus audífonos. Al tocar el icono de Accesorios dentro de la barra de Navegación, puede seleccionar un accesorio emparejado, iniciar y detener la transmisión de audio y controlar el volumen de la transmisión y los sonidos circundantes.

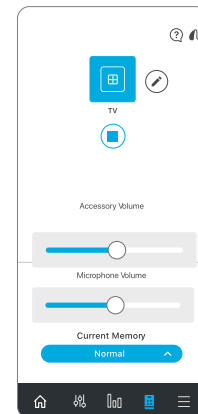

Inteligencia Artificial (AI) de voz* combina las ventajas de un micrófono en su teléfono inteligente con el poder computacional de la inteligencia artificial. El beneficio es una mejora del habla más potente y flexible en los ambientes auditivos más exigentes solo para pacientes con pérdida auditiva grave. Consulte a su profesional de la audición para obtener más información.

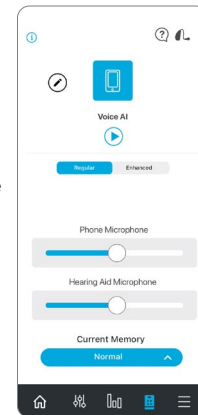

* Disponible solo en smartphones iOS.

Guía del usuario

Una descripción general de cada pantalla/función está disponible en la aplicación Thrive. Cada sección muestra los detalles de la pantalla y describe cada función.

Ajustes del dispositivo

Los ajustes avanzados de sus audífonos se pueden activar/desactivar o configurar en esta área.

Alertas permiten que su audífono reproduzca un tono de alerta para ciertas notificaciones telefónicas, como eventos del calendario, correo electrónico y redes sociales.

Gesto de toque permite habilitar o deshabilitar el gesto de toque, establecer la sensibilidad y elegir la función para activar mediante el gesto de toque (Thrive Assistant, Iniciar/Detener transmisión de accesorios o Edge Mode).

Transmisión automática permite que sus audífonos reconozcan el momento en que comienza una transmisión de audio y cambia automáticamente a una memoria diferente y a un ajuste de reducción de micrófono específicamente optimizados para transmisión de audio.

Aceptar/finalizar/rechazar llamadas le permite habilitar o deshabilitar la función para aceptar, finalizar o rechazar una llamada usando el control de usuario en su audífono (solo iOS).

El **Modo mascarilla** es una memoria personalizada que compensa la pérdida de audibilidad del habla debido al uso de mascarillas potenciando el sonido en las regiones de frecuencia afectadas. La activación del Modo mascarilla hará que se pueda seleccionar en el menú Memorias.

Máxima comodidad permite que sus audífonos reduzcan drásticamente el ruido para optimizar la calidad del sonido en ambientes ruidosos. Esta función solo está disponible si sus audífonos no son compatibles con Edge Mode.

Encendido/apagado automático le permite ahorrar energía de la pila de manera fácil y automática cuando no usa sus audífonos. Qúitese los audífonos, colóquelos en una superficie plana y estable y pasarán al modo de bajo consumo al cabo de 15 minutos. Tome sus audífonos y vuelva a ponérselos para reanudar automáticamente la máxima potencia.

Se puede acceder a **Thrive Assistant Mic** tocando *Micrófono del audífono* o *Micrófono del teléfono* para seleccionar la preferencia de qué micrófono usará Thrive Assistant. Micrófono de HA es el valor predeterminado.

Puntaje de bienestar

Al acceder a Puntaje de bienestar a través de Ajustes, puede agregar/actualizar sus datos demográficos para una actividad de seguimiento de pasos más precisa. Además, puede establecer/modificar objetivos para Pasos, Ejercicio y Levantarse.

Alertas de caída

La sensibilidad de **Alerta automática** le permite ajustar la sensibilidad de la Alerta automática en la aplicación Thrive. El aumento de la sensibilidad puede incrementar la probabilidad de detectar una caída. La disminución de la sensibilidad puede ayudar a reducir la probabilidad de falsas alertas.


Perfil le permite modificar la información de su perfil.

Los indicadores de **Alerta automática y Alerta manual** brindan la capacidad de revisar y hacer una demostración de los indicadores de alerta de caída para reconocerlos en caso de una caída.

Contactos permite agregar, editar o eliminar un contacto.


Temporizador de cancelación le permite seleccionar 60 ó 90 segundos como tiempo asignado antes de que se envíe un mensaje de texto de alerta.

Mensaje de alerta permite editar su nombre y muestra un ejemplo de un mensaje de texto de alerta.

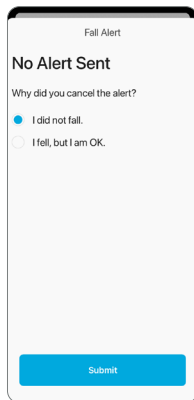


Traducir

Traducir es una función que le permite elegir su idioma y el idioma de otro hablante para entablar una conversación. Cuando hable por teléfono, la aplicación traducirá su discurso y lo mostrará en el idioma de la otra persona. Cuando la otra persona habla por teléfono, la aplicación traducirá su discurso, lo mostrará en el idioma de usted y transmitirá ese texto traducido a sus audífonos en su idioma.

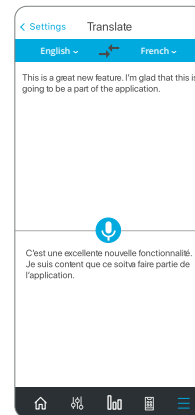

Transcribir



Transcribe es una función que le permite incluir subtítulos para situaciones del mundo real. Cuando usted u otros hablen por teléfono, la aplicación Thrive transcribirá ese discurso y lo mostrará en su pantalla. También brindan la opción de guardar, enviar por mensaje de texto, copiar o enviar por correo electrónico el texto transcrito.

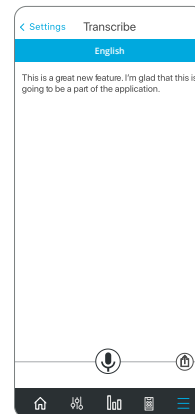

Auto Revisión

Auto Revisión le brinda una forma rápida y conveniente de analizar el rendimiento de sus audífonos por su cuenta. Con Auto Revisión, puede realizar diagnósticos sobre el rendimiento de los componentes dentro de sus audífonos, incluidos los micrófonos, el receptor, el circuito y los sensores.


Auto Revisión mostrará el rendimiento de los componentes y le brindará instrucciones de servicio si es necesario (la mayoría de los problemas se deben a presencia de cera/suciedad y se pueden resolver fácilmente). Sus audífonos vendrán con la pauta de referencia ya establecida.

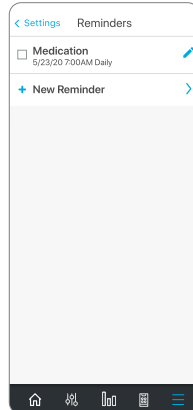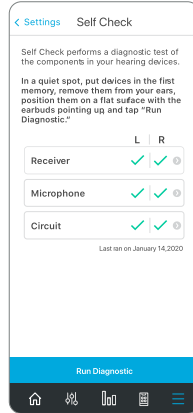

Recordatorios


La función Recordatorios puede ayudarlo a realizar un seguimiento de las tareas y citas importantes en su ajetreada vida, sin tener que recordarlas todas.

Puede configurar y recibir notificaciones de recordatorio visual en su teléfono inteligente y/o notificaciones de recordatorio audibles transmitidas desde su teléfono inteligente a través de sus audífonos para una multitud de tareas, como tomar medicamentos, reabastecer prescripciones, limpiar sus audífonos, hacer ejercicio y beber agua.

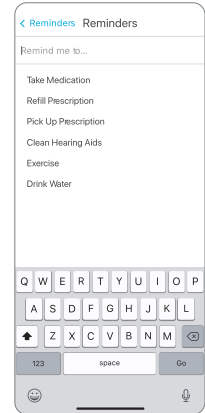

Además, puede personalizar sus recordatorios, por ejemplo: tomar medicamentos para la presión arterial, pasear al perro, llamar al fisioterapeuta, llevar una botella de agua y una colchoneta al yoga. Después de configurar el nombre, la fecha y la hora del recordatorio, puede seleccionar la opción para que este recordatorio se repita diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente.

Y no debe preocuparse si no puede completar la tarea en el momento en que recibe su recordatorio, porque las tareas atrasadas se mostrarán en rojo en la pantalla Recordatorios hasta que las desmarque.

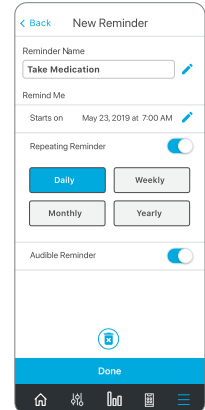

Programación remota TeleHear

Creación de una cuenta


TeleHear requiere que cree su propia cuenta. A través de esta cuenta, se pueden realizar copias de seguridad de sus audífonos y sincronizarlos entre varios teléfonos. Puede crear una cuenta durante el proceso de instalación o más adelante si lo desea. Puede crear una cuenta usando su cuenta existente de Facebook o Google, o creando su propia cuenta usando el correo electrónico y una contraseña de su elección.

Copia de seguridad

Cuando realiza algún cambio en la aplicación Thrive, esos cambios se guardan en su cuenta en la nube para hacer una copia de seguridad de los ajustes en tiempo real.

Unirse a una sesión en vivo


Puede obtener un código de su profesional de la audición para activar la programación remota como opción. Esto le permite conectarse directamente con su profesional de la audición para que pueda ajustar su experiencia auditiva a través de una sesión de video.

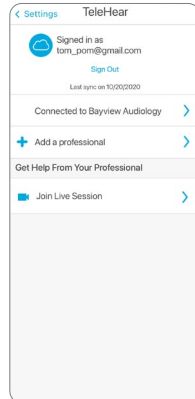

Aplicación Thrive Care


La aplicación Thrive Care brinda tranquilidad a las personas con las que elige compartir información útil mientras lo ayuda a sentirse seguro e independiente.

Con Thrive Care, puede compartir información como actividad física, uso de audífonos, actividad social y más, con sus cuidadores o seres queridos.

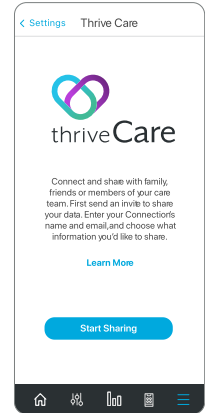

Encontrar mis audífonos

La función Encontrar mis audífonos le permite rastrear la última ubicación física conocida de sus audífonos en un mapa. Cuando acceda a la función Encontrar mis audífonos, verá una vista de mapa con una nota que muestra la ubicación donde se conectaron sus audífonos por última vez. Si sus audífonos están conectados activamente (o se están conectando), las barras de la parte inferior de la pantalla se moverán para indicar qué tan cerca o lejos está de sus audífonos.

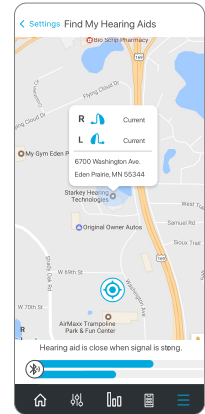

Ajustes de la aplicación

Las opciones de Ajustes de la aplicación incluyen la capacidad de cambiar entre el modo Básico o Avanzado. El modo Avanzado brinda una funcionalidad completa para todas las funciones de la aplicación, mientras que el modo Básico incluye un subconjunto de los conceptos básicos para simplificar las cosas.

Acerca de

Brinda información sobre Starkey, el Acuerdo de licencia de usuario final, la política de privacidad y la versión de la aplicación. También hay una sección para ingresar comentarios.

Modo de demostración

Pone la aplicación Thrive en modo de demostración de manera que esta funciona sin ningún audífono conectado para que todas las funciones sean visibles a modo de demostración. Los ajustes que realice en el modo de demostración no se implementarán a sus audífonos.

Información sobre seguridad

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con su dispositivo Starkey debe ser comunicado a su representante local de Starkey Hearing Technologies y a la Autoridad Competente del Estado Miembro donde resida. Se considera incidente grave cualquier mal funcionamiento, deterioro de las características y/o rendimiento del producto, o inadecuación en el Manual de Operaciones/ etiquetado del producto que pueda conducir a la muerte o al deterioro grave del estado de salud del usuario, o que pueda llegar a hacerlo en caso de repetición del incidente.

Uso previsto

La aplicación Control Auditivo Thrive es un dispositivo médico de software que permite al usuario controlar de forma remota el volumen, la selección de la memoria, silenciar/desactivar silenciar, iniciar/detener la transmisión de multimedia y la función de enmascaramiento de tinnitus de los audífonos inalámbricos Starkey de 2,4 GHz. También proporciona una interfaz de teléfono inteligente para estos audífonos y permite al usuario usar su dispositivo iOS como un dispositivo de transmisión de audio.

Indicaciones de uso

La aplicación Control Auditivo Thrive es un programa opcional indicado para los pacientes que usan audífonos inalámbricos Starkey de 2,4 GHz y que desean usar un dispositivo iOS o Android para que sirva de control remoto, interfaz de teléfono inteligente o transmisor de multimedia.

Para acceder a una versión electrónica de esta guía del usuario, visite www.starkey.com/support/operations-manuals.

Para obtener información sobre la compatibilidad con iOS/Android y la aplicación Control Auditivo Thrive, visite starkey.com/thrivesupport.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod Touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio registrada de Apple Inc.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Starkey, el logotipo de Starkey, SoundSpace, Thrive, el logotipo de Thrive, Thrive Care, el logotipo de Thrive Care, Edge Mode y TeleHear son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.

iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en EE.UU y en otros países, y se usa con licencia.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas, propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Starkey es bajo licencia.



Starkey.com

6700 Washington Ave. S.
Eden Prairie, MN 55344
1.800.328.8602

